


Návod k použití vanového zvedáku Aquatec Beluga

**AQUATEC®**  
*BELUGA*

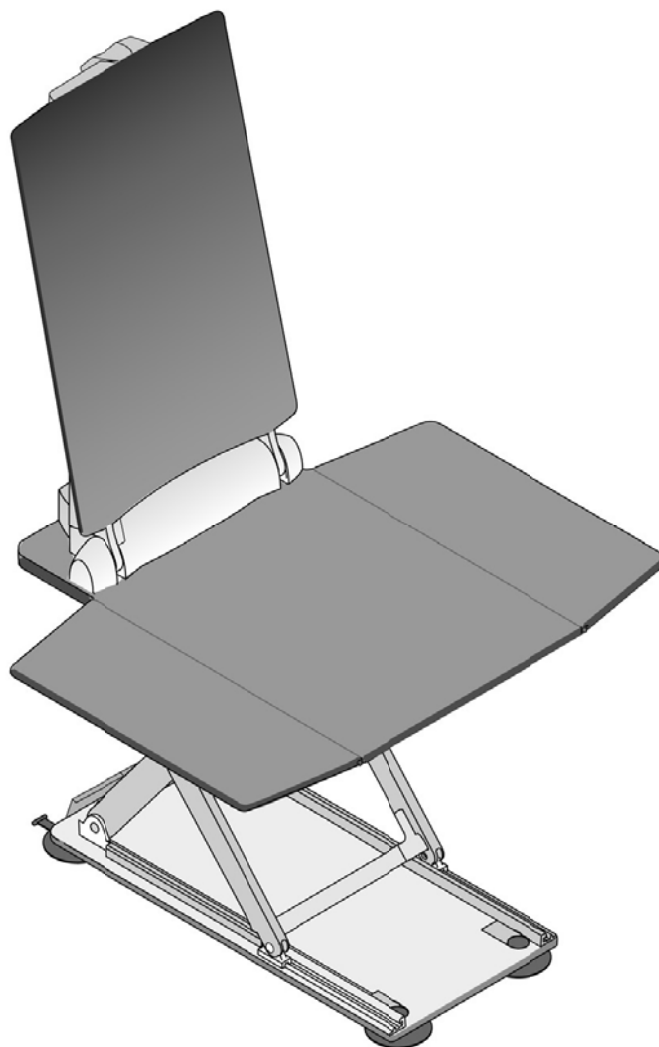

AQT00071

## POUŽITÍ

Zvedák do vany je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen při osobní hygieně využít standardně vybavenou vanu. Svou konstrukcí usnadňuje pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminuje možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňuje manipulaci s pacientem a zvyšuje jeho soběstačnost.


## POPIS

- 1 Opěrka zad
- 2 Sedák
- 3 Řídící jednotka
- 4 Akumulátor
- 5 Boční přesouvací křídélka
- 6 Ovladač
- 7 Motorová jednotka
- 8 Nůžkový zvedací mechanismus
- 9 Přísavka
- 10 Základna




## Návod k použití vanového zvedáku Aquatec Beluga

- 1 Boční klapka
- 2 Sedadlo - deska
- 3 Závěs na opěradlo
- 4 Vodítko
- 5 Zvedací nůžky
- 6 Drážka
- 7 vřetena noha držák
- 8 Základová deska
- 9 Kluzné vodítko
- 10 Přední přísavka
- 11 Zadní přísavka

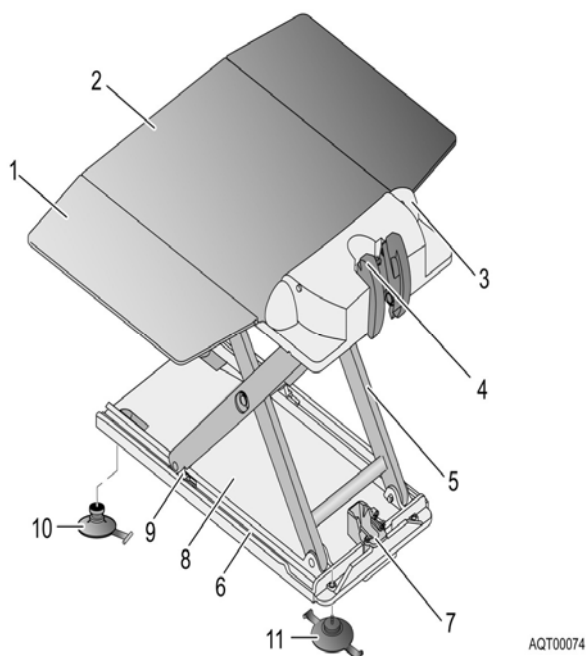

- 1 Ruční ovládání
- 2 Pohonná jednotka - Kryt
- 3 Spirálový kabel pro ruční ovládání
- 4 Opěradlo
- 5 vřeteno
- 6 Úchyt pro vřeteno
- 7 Upínací kroužek
- 8 Koncovka vřetene
- 9 Úchyt (kolejnice) baterie se zástrčkou

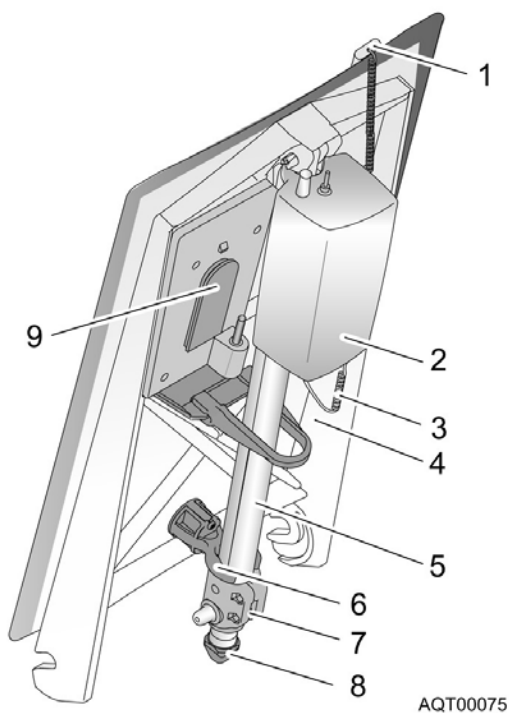

## TECHNICKÉ PARAMETRY

### Rozměry

Šířka sedáku při plně otevřených bočnicích 70cm

Šířka sedáku bez bočnic 40cm

Hloubka sedáku 51cm

Výška sedáku v nejvyšší poloze 45cm

Výška sedáku v základní poloze 8cm

Výška opěrky zad 65cm

Šířka opěrky zad 35cm

### Hmotnosti

Celková s akumulátorem cca. 13,8 kg

Akumulátor cca. 1,3 kg

Sedací část cca. 5,9 kg

Opěrka zad cca. 7,9 kg

Nabíječka se zástrčkou cca. 0,5 kg

### Napájení

Akumulátor (olověný) 12V/3,4Ah

Jmenovité napětí 12 V, stejnosměrné

Jmenovitý příkon 100 VA

Pojistka 10A

### Nabíječka akumulátoru

Napájení / příkon 220VAC/50Hz/55mA/10,5W

Výstup / výkon 12VDC/400mA/4,8VA

Krytí IP 40

Doba nabíjení cca. 6 hodin

## OBSAH BALENÍ

**Sedací část** (sestavená k použití) se skládá z těchto částí: - základní deska s přísavkami -  
nůžkový zvedací mechanismus - sedák s pohyblivými bočními částmi

**Zadní opěrka** (sestavená k použití) se skládá z těchto částí: - opěrka - akumulátor -  
ovladač s kabelem pro ruční použití

### Nabíječka akumulátoru

## **BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

Před používáním zvedáku si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele. Před používáním zvedáku konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem. Zvedák nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost (viz Technické parametry).

Při skládání a manipulaci se zvedákem postupujte opatrně, aby nedošlo k úrazu prstů. Pro větší bezpečnost doporučujeme kombinovat s protiskluzovou podložkou a madlem. Zvedák je konstruován pro asistenci jedné osoby při koupání ve vaně. Koupaná osoba nesmí používat zvedák bez přítomnosti druhé osoby, pro případ pomoci. Vždy respektujte pokyny lékaře nebo odborné obsluhy. Jestliže je rozměr mezi dnem a horním okrajem vany větší než 42 cm, použijte výškové adaptéry. Je možné je objednat od dodavatelů nebo od výrobce ve výškách: 2, 4 a 6cm. Když je zvedák v horní poloze, prosím, ujistěte se, že pohyblivé bočnice sedáku přesahují přes horní okraje vany tak, abyste se mohli dostat do vany a z vany bezpečně a snadno. Před prvním použitím zvedáku vyzkoušejte správnou funkci zvedáku. Nikdy se nepřidržíte částí mezi základnou a sedátkem zvedáku (nůžkového mechanismu). Nikdy nečistěte zadní opěrku pomocí vysokotlakých čisticích přístrojů (parní trysky apod). V případě, že používáte koupelové oleje, soli nebo mastné roztoky, prosím, používejte jen doporučená množství. Vyšší množství těchto prostředků může mít vliv na posuvné části zvedáku a způsobí rovněž obtížnější čištění zvedáku. Rychle rozpustné koupelové soli mohou být bez problému používány. Polohu zadní opěrky (kolmá nebo sklopená) lze měnit pouze v případě, je-li zvedák v základní (dolní) pozici. Ovladač by měl být vyjmut ze zásuvky umístěné v opěrce zvedáku pouze v případě jeho opravy, anebo při kompletním důkladném čištění zvedáku. Ruční ovladač je připojen ke kontrolní jednotce pomocí kabelu. Dbejte na to, aby se kabel nedostal do pohyblivých částí zvedáku. Při koupání mějte ruční ovladač vždy v dosahu tak, aby bylo možné stisknout nouzové STOP tlačítko v případě nebezpečí. Ukazuje-li zvedák příznaky nesprávné funkce, prosím, kontaktujte prodejce zvedáku.

### **Akumulátory a nabíječ akumulátoru**

Používejte pouze akumulátory dodané se zvedákem, nepoužívejte akumulátory určené k jiným účelům. Nikdy neházejte akumulátory do ohně a neskladujte je v blízkosti ohně. Kontakty akumulátoru nesmí být zkratovány.

Nikdy se nesnažte akumulátory otevírat. V případě, že je akumulátor poškozen, unikne z něj roztok kysličníku siřičitého a přijde do styku s pokožkou nebo oblečením, omyjte se okamžitě vodou. Při zasažení očí touto látkou, vymyjte oči velkým množstvím vody a kontaktujte lékaře.

## Návod k použití vanového zvedáku Aquatec Beluga


Vadné nebo nefunkční akumulátory musí být zničeny podle pravidel aplikovaných pro akumulátorové baterie. Nabíječku akumulátorů používejte v suchém prostředí, tzn. nikdy ji nepoužívejte v koupelně. Používejte pouze originální nabíječku akumulátoru dodanou se zvedákem.

Nabíječku připojte k síti pouze v případě, že akumulátory jsou umístěny v místě pro nabíjení. Akumulátory a nabíječku používejte a skladujte mimo dosah dětí!

### **AKUMULÁTOR A NABÍJEČKA AKUMULÁTORU**

Akumulátor slouží pro zásobování zvedáku elektrickou energií. Opatrné zacházení s akumulátorem přispěje k jeho delší životnosti. Kapacita plně nabitého akumulátoru vystačí minimálně pro pět koupelí. Výrobce doporučuje dobít akumulátor po každé koupeli.

Kontakty akumulátoru a nabíječky udržujte čisté a bez mastnot. Akumulátor a nabíječku čistěte s použitím suchého nebo mírně navlhčeného hadříku. Akumulátor má interní svorkovnici pro přímé připojení k nabíječce. Elektronika nabíječky kontroluje správné nabíjení akumulátoru. Správné nabíjení akumulátoru je indikováno rozsvícením kontrolky na zásuvce nabíječky. Když je akumulátor plně nabit kontrolka zhasne.

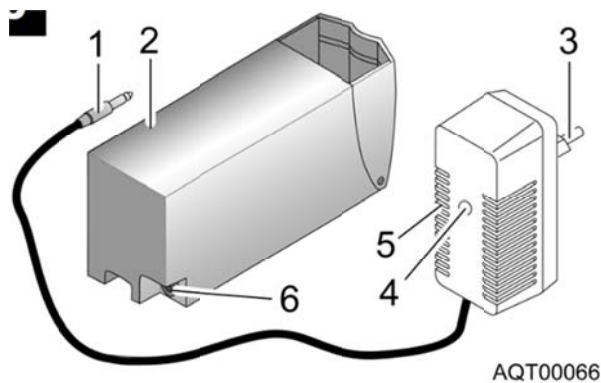

## **POUŽITÍ OVLADAČE ZVEDÁKU**

### **Řídící blok**

Řídící blok vyjíte ze zásuvky v opěrce zad pouze v případě nutnosti, kdy je nutné jej opravit anebo při důkladném čištění zvedáku. Sejměte potah opěrky. Vyjměte akumulátor a řídící blok.


Když instalujete řídící blok zpět, zajistěte, aby držadlo bloku bylo směrem k akumulátoru a kabel nebyl poškozen.

### **Ruční ovladač**

Ruční ovladač je připojen k řídicímu bloku pomocí kabelu. Ovladač obsahuje všechny ovládací elementy. Zelené tlačítko vpravo slouží k ovládní pohybu zvedáku směrem nahoru. Zelené tlačítko vlevo slouží k ovládní pohybu zvedáku směrem dolů.

Červené tlačítko ve středu ovladače je nouzové STOP tlačítko. Ovladač je konstruován tak, aby pohyb zvedáku byl možný, jestliže je stlačeno jedno nebo obě zelená tlačítka. Jestliže je tlačítko uvolněno, pohyb se zastaví okamžitě. V případě, že akumulátor není dostatečně nabit, aby bylo možné provést celou koupel, zvedák nelze spustit ke dnu vany. Je možné provést zvednutí sedačky zvedáku do horní polohy a vystoupit z vany.

V případě stisknutí nouzového STOP tlačítka, jsou všechny funkce zvedáku zastaveny. Pro obnovení funkcí zvedáku je nutné uvolnit červené STOP tlačítko a stisknout jedno ze zelených ovládacích tlačítek směru pohybu zvedáku. Živé části (pod napětím) ručního ovladače jsou utěsněny proti vniknutí vody. Ruční ovladač je plovoucí a může být položen do vody. Rozsvítí-li se kontrolka na ovladači a zůstává svítit, znamená to: Akumulátor je vybit, zvedák lze zvednout do horní polohy a akumulátor musí být nabit.

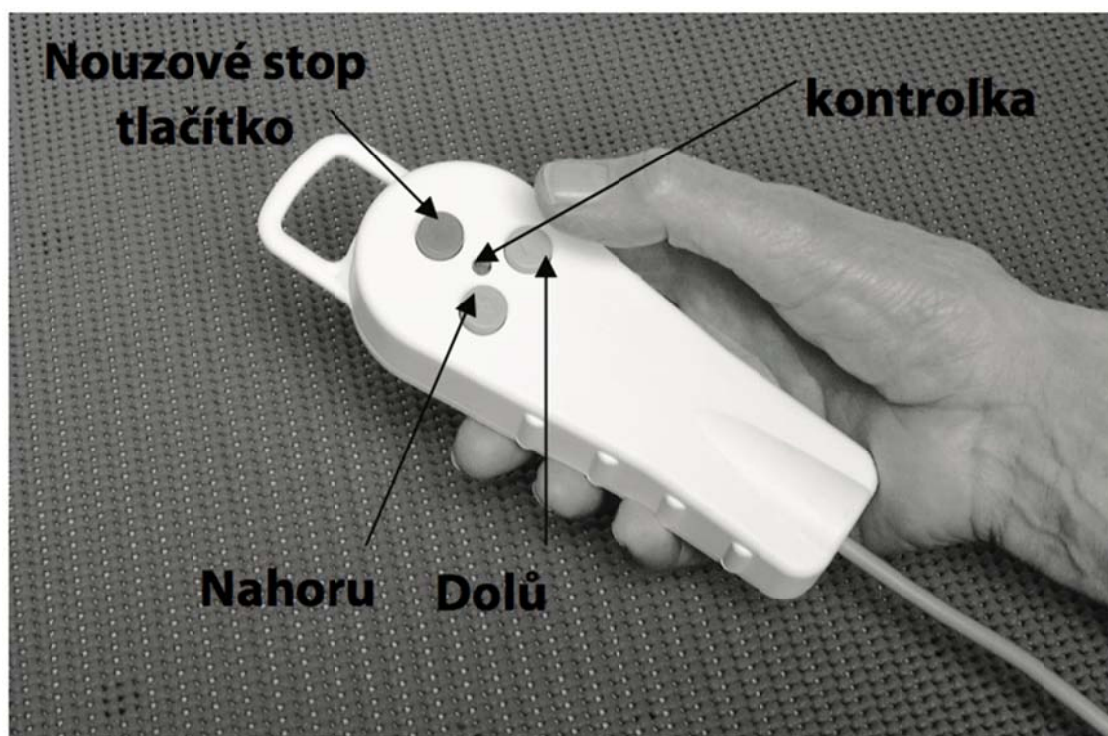

Zkontrolujte, zda je akumulátor plně nabit. Zasuňte akumulátor do zásuvky v opěrce zad pouze v případě, jestliže je plně nabit. Zkontrolujte, zda je zvedák bezpečně zafixován ke dnu vany pomocí přísavek na základně. Pomocí ručního ovladače spusťte sedák do spodní polohy k základně zvedáku u dna vany. Pomocí ručního ovladače zvedněte zvedák do horní polohy, aby se opěrka zad napřímila a sklopné bočnice sedáku usadily přes okraje vany. Naplňte vanu vodou a vyzkoušejte teplotu vody. Posadte se na bočnici sedáku. Nohy nechte v poloze kolmo na boční stěnu vany. Posuňte se do středu sedáku a současně zvedněte jednu nohu přes okraj vany. Poté se přetočte tak, že dosáhnete správné polohy pro koupání. Pomocí použití ručního ovladače spusťte sedák do požadované polohy ve vaně. Vždy zkontrolujte, zda kabel ovladače nemůže být přiskřípnut do pohyblivých částí zvedáku během snižování nebo zvyšování sedáku. Při koupání vždy mějte ruční ovladač ve vašem dosahu. Abyste se dostali ven z vany, je nutné zdvihnout sedák do horní polohy tak, aby bočnice sedáku opět zakryly okraje vany. Zvedněte obě nohy přes okraj vany a přesuňte tělo k okraji vany. V případě, že máte potíže s přesunutím těla k okraji sedáku a zvednutím nohou, informujte se u dodavatele zvedáku o možnosti zakoupení otočné a posuvné podložky. Akumulátor by měl být nabit po každém koupání.



## **ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**

Jelikož zvedák náleží k pomůckám osobní hygieny, měl by být opatrně vyčištěn po každém použití. Povlaky sedáku a opěrky zad jsou odnímatelné a je možno prát je max. při 60 °C. Doporučujeme používat jemný prací prostředek.

Neždímejte povlaky před sušením! Konstrukce zvedáku by měla být také čištěna teplou vodou maximálně při 60 °C. Pro snadnější čištění je možné použít kartáč a standardní čisticí prostředky. Nůžkový zvedací mechanismus by měl být čas od času ošetřen vazelínou.

## **Akumulátor a nabíječka akumulátoru**

Před čištěním nabíječky vyjměte zástrčku nabíječky ze síťové zásuvky. Nikdy neponořujte nabíječku do vody, nesprchujte ji vodou. Použijte k čištění suchý nebo mírně vlhký hadřík. Akumulátor rovněž čistěte mírně vlhkým hadříkem. Při použití běžného dezinfekčního prostředku, dbejte pokynů výrobce.

## **SERVIS A OPRAVY**

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

## **ZÁRUKA**

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

## **UPOZORNĚNÍ**

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma Invira s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.