



ZDRAVOTNÍ
TECHNIKA

Prodejce	Invira s.r.o.
Telefon	+420 773 030 533
Email	info@invira.cz
Adresa	Paličkova 75/2, Ostrava 709 00, (Czech Republic)
IČO	29446287
DIČ	CZ29446287

NÁVOD K POUŽITÍ

VOZÍK MECHANICKÝ



CE

 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA	Prodejce	Invira s.r.o.
	Telefon	+420 773 030 533
	Email	info@invira.cz
	Adresa	Paličkova 75/2, Ostrava 709 00, (Czech Republic)
	IČO	29446287
	DIČ	CZ29446287

POUŽITÍ

Mechanický vozík je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby, osoby se sníženou schopností mobility, postižením dolních končetin nebo s různým stupněm ochrnutí. Vozík slouží pro přepravu osob v interiéru i exteriéru.

POPIS

Rám vozíku je vyroben z ocelových trubek s povrchovou úpravou, což zaručuje jeho výborné užitkové vlastnosti v nejnáročnějších provozních podmínkách (u modelu s širší sedáku 51cm je použitý zesílený dvojitý kříž). Vozík je vybaven plnými postranicemi a odnímatelnými podnožkami se stupačkami. Pohyb vozíku zajišťují pneumatická zadní kola s výpletem, která jsou opatřena ovládacími obručemi a přední plná kola, která jsou uložena v otočných vidlicích. Pro zajištění stability v klidové poloze je vozík vybaven ručními parkovacími brzdami zadních kol po obou stranách vozíku. Veškeré čalounění vozíku (sedačka, zádová opěrka, područky) je lehce omyvatelné, vyrobené z omyvatelných materiálů, které zároveň svými vlastnostmi umožňují dlouhodobé používání vozíku.

Madlo doprovodu

Zádová opěrka

Područka

Postranice

Zadní kolo

Hnací obruč

Parkovací brzda

Podnožka

Lýtkový pás

Přední vidlice

Stupačka

Přední kolo



 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA	Prodejce	Invira s.r.o.
	Telefon	+420 773 030 533
	Email	info@invira.cz
	Adresa	Paličkova 75/2, Ostrava 709 00, (Czech Republic)
	IČO	29446287
	DIČ	CZ29446287

TECHNICKÉ PARAMETRY

ŠÍŘKA (cm)	DÉLKA (cm)	VÝŠKA (cm)	ŠÍŘKA SEDAČKY (cm)	HLOUBKA SEDAČKY (cm)	VÝŠKA SEDAČKY (cm)	VÝŠKA STUPAČEK (cm)	MAXIMÁLNÍ NOSNOST (kg)	HMOTNOST (kg)
ŠS + 20	105	92	40,46	40	51	40-53	115	19
ŠS + 20	105	92	51	40	51	40-53	140	23

Vyráběné šíře sedáku 38 až 55cm.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním vozíku si pečlivě pročtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele. Před používáním vozíku konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem. Při transportu (automobilem nebo autobusem) nepoužívejte vozík k sezení. Vozík nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost (viz tabulka). Při skládání a rozkládání vozíku postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů. Je-li vozík v klidu, vždy jej zabrzděte. Stupačka vozíku je určena pro oporu dolních končetin, nikdy na ní nestoupejte a nepřenášejte váhu celého těla. Neprojíždějte s vozíkem měkký terén (tráva, písek, bahno...). Vozík nepoužívejte na kluzkém, kopcovitém nebo velmi hladkém povrchu. Nezdolávejte s ním příliš vysoké překážky a strmě nakloněné roviny. Vždy přizpůsobte styl i rychlost jízdy terénu a okolním podmínkám.

 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA	Prodejce	Invira s.r.o.
	Telefon	+420 773 030 533
	Email	info@invira.cz
	Adresa	Paličkova 75/2, Ostrava 709 00, (Czech Republic)
	IČO	29446287
	DIČ	CZ29446287

OBSAH BALENÍ

Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části vozíku, tj. vozík s předními i zadními koly, podnožky se stupačkami a lýtkový pás. Součástí balení je také pumpička na kola.

ROZLOŽENÍ A SLOŽENÍ VOZÍKU

Postup při rozkládání vozíku:

1. Vozík naklopte směrem k sobě.
2. Volnou rukou stlačte trubku sedačky dolů a vozík částečně rozložte.
3. Vozík postavte zpět na všechna čtyři kola.
4. Stlačte obě trubky sedačky směrem dolů, až do úplného rozložení vozíku.
5. Nasadte podnožky a připevněte lýtkový pás
6. Po usazení na vozíku sklopte stupačky.

Postup při skládání vozíku:

1. Odklopte stupačky, popřípadě odejměte kompletní podnožky
2. Vytáhněte sedačku za ucha po stranách nahoru, až do úplného složení vozíku

PODNOŽKY A STUPAČKY

Postup při odejmutí podnožky:

1. Uvolněte tahem směrem dovnitř vozíku páčku aretační pojistky na podnožce .
2. Po následném uvolnění vykleňte podnožku do strany.
3. Vysuňte podnožku směrem nahoru.

 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA	Prodejce	Invira s.r.o.
	Telefon	+420 773 030 533
	Email	info@invira.cz
	Adresa	Paličkova 75/2, Ostrava 709 00, (Czech Republic)
	IČO	29446287
	DIČ	CZ29446287

KOLA

Postup při dotažení zadního kola:

1. Povolte matici uvnitř rámu.
2. Sejměte plastovou krytku hlavy šroubu osy kola a dotáhněte ji.
3. Vraťte plastovou krytku na hlavu šroubu a zkontrolujte, zda v ložisku není vůle.
4. Utáhněte vnitřní matici.

Pneumatiky kol je nutné hustit vždy s ohledem na hmotnost uživatele a kvalitu terénu, ve kterém bude vozík používán.

BRZDY

Aktivace brzdy:

1. Uvedte vozík do klidové polohy.
2. Páku brzdy stlačte směrem od sebe.

Ručních parkovacích brzd vždy využívejte při nasedání a vysedání z vozíku. Použití těchto brzd eliminuje nežádoucí pohyb vozíku při těchto úkonech. Polohu brzdy a tím i její účinnost lze nastavit posunutím úchytu brzdy po příslušné trubce rámu. Brzdy nikdy nepoužívejte k brzdění během jízdy!

KŘÍŽOVÁ VZPĚRA RÁMU

Centrální šroub křížové vzpěry musí být nastaven tak, aby byl zachován volný pohyb obou částí vzpěry, což zaručuje plynulé a snadné skládání a rozkládání vozíku. Nikdy nezkracujte délku středního šroubu vkládáním vymešovacích podložek!

 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA	Prodejce	Invira s.r.o.
	Telefon	+420 773 030 533
	Email	info@invira.cz
	Adresa	Paličkova 75/2, Ostrava 709 00, (Czech Republic)
	IČO	29446287
	DIČ	CZ29446287

ÚDRŽBA

Čalounění vozíku je možné čistit běžnými čistícími a dezinfekčními prostředky, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Čistěte vždy celou plochu, kterou po odstranění nečistot důkladně opláchněte čistou vodou. Všechny kovové díly udržujte suché a čisté. Doporučujeme občas přeleštit vhodným leštícím prostředkem. Pravidelně kontrolujte všechny zajišťovací prvky (brzd, postranic, stupaček, kol), abyste se ujistili, že jsou v bezpečném a provozuschopném stavu. Občasné lehké promazání (sprej WD-40) pohyblivých částí zaručí bezchybný a bezhlučný provoz. Pravidelně kontrolujte stav pneumatik, tlak v pneumatikách je třeba přizpůsobit hmotnosti uživatele. Vozík skladujte v suchém a čistém prostředí, chraňte před prachem, vlhkostí a chemickými vlivy.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců na nové a 6 měsíců na repasované ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností Invira s.r.o. nebo prodávajícím.