

 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA	Prodejce	Invira s.r.o.
	Telefon	+420 605 942 335
	Email	info@invira.cz
	Adresa	Paličkova 75/2, Ostrava 709 00, (Czech Republic)
	IČO	29446287
	DIČ	CZ29446287

PŘÍRUČKA A POKYNY K ÚDRŽBĚ

ANTIDEKUBITNÍ TLAKOVÁ PUMPA SY-B CODE RA7573299 A BUBLINOVÁ MATRACE MB-300 CODE RA7573301

POKYNY K UŽÍVÁNÍ:

Vážený zákazníku, produkt, který se chystáte použít, je zdravotní pomůcka. Tlakové čerpadlo střídá tlak v bublinách matrace a tím pomáhá prevenci prvního stupně proleženin. Pomůcka je vhodná pro dlouhodobou léčbu a pro domácí použití. Přístroj snižuje tlak na pokožku a pomocí jemné masáže zlepšuje průtok krve a zlepšuje okysličení tkání.



PŘED POUŽITÍM

1. Při otevření balení zkontrolujte neporušenost zařízení. Věnujte zvláštní pozornost přítomnosti poškození plastových částí, které mohou zpřístupnit dotyk možných živých částí zařízení. V těchto případech nepoužívejte přístroj.
2. Před připojením spotřebiče vždy zkontrolujte, zda elektrické údaje uvedené na typovém štítku a typ použitého konektoru odpovídá parametrům elektrické sítě, do které má být připojen.
3. Uchovávejte mimo dosah dětí.
4. V případě poruchy se prosím okamžitě obraťte na prodejce.
5. Výrobce není odpovědný za nesprávné použití.
6. Tato zdravotní pomůcka je určena výhradně pro použití, pro které byla navržena. Výrobci nemůže být přičítána odpovědnost za škody způsobené nesprávným nebo nevhodným použitím.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte přístroj v případě, že je některá část zařízení nebo jeho součástí poškozená, viditelně porušená, po náhlém pádu nebo zasažení vodou. Nedodržování těchto pravidel může ohrozit bezpečnost zařízení. Pro jakékoli doplňující informace se obraťte na výrobce.






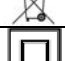



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Aby nedošlo k požáru nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí nebo v přítomnosti anestetických plynů, hořlavých materiálů nebo v přítomnosti kapaliny, která by mohla vniknout do zařízení.



SYMBOLY

	Postupujte podle pokynů
	Návod obsahuje užitečné rady k použití
	Obecná poznámka
	ON (Zapnuto)
O	OFF (Vypnuto)
	Zařízení typu BF dle normy IEC 60601-1
	Rozsah průtoku vzduchu
	Nakládání s odpady v souladu se směrnicí. 2002/96/CE včetně budoucích aktualizací
	Dvojitá izolace



NÁVOD K POUŽITÍ

1. Umístěte čerpadlo vodorovně nebo jej zavěste u nohou postele za specifická ramínka zesponu přístroje.
2. Nafukovací bublinovou matraci umístěte vždy na tradiční matraci postele a věnujte zvýšenou pozornost, aby hadice nebyly zkroucené nebo zlomené. Přechýlající konce matrace založte pod tradiční matraci.
3. Připojte tlakovou pumpu a stiskněte ON. Otočný knoflík pro nastavení průtoku vzduchu otočte do maximální polohy. Po 20 minutách by měly být matrace připraveny.
4. Vždy používejte prostěradlo nebo potah mezi bublinami nafukovací matrace a pacientem.
5. Knoflík pro regulaci tlaku na tlakové pumpě upravte podle hmotnosti pacienta, aby dosáhl co největšího



pohodlí. **ROZSAH PRŮTOKU VZDUCHU**

HMOTNOST	POLOHA KNOFLÍKU PRO REGULACI TLAKU
50KG	POZICE 1-2
50KG-65KG	POZICE 3-4
65KG-85KG	POZICE 5-7
85KG-100KG	POZICE 8-10



TECHNICKÉ PARAMETRY

Klasifikační systém (Dir. 93/42/CEE)	Medical Device Class I
Pressure Pump SY-B	Mattress MB-300
Výrobce: RICANT SNC	Výrobce: RICANT SNC
Kód produktu: RA7573299	Kód produktu: RA7573301
Název: Tlaková pumpa pro antidekubitní bublinovou matraci	Název: Antidekubitní bublinová matrace
Napájecí napětí: 230V~ -50Hz	Rozměry: cm 200x88x7H + 90cm borders
Průtok vzduchu: 5 liter/min	Počet buněk: 130 bublin
Rozsah tlaku: 40 mmHg ÷ 100 mmHg	Materiál: PVC podle CE
Doba cyklu: 8 min	PVC tloušťka: 30 micron
Spotřeba elektrické energie: 10W	Barva: béžová
Třída bezpečnosti: class II	Hmotnost: cca 2,3 kg
Krytí: externí pojistka F500 mA	Opravná sada je součástí
Rozměry: 265(L)mm x 125 (W)mm x 105(H)mm	Pumpa je propojena speciální hadicí
Obal: ABS	Zatížení: pro pacienty od 30kg do 100kg
Hmotnost: cca 1,4kg	Vyrobeno: China
Vyrobeno: China	

Pracovní podmínky

Pokojeová teplota: 10°C ÷ 35°C

Vlhkost: 20 ÷ 80% RH

Skladovací a přepravní podmínky

Pokojeová teplota: -15°C ÷ 50°C

Vlhkost: 10 ÷ 90% RH



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Zařízení nevyžaduje údržbu.

K čištění matrace použijte neutrální čisticí prostředek, vlhký hadřík nebo dezinfekční prostředek. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, které by mohly poškodit matraci.

K čištění tlakové pumpy nepoužívejte příliš vlhký hadřík. Nepoužívejte také žádné druhy mycích prostředků.

VAROVÁNÍ: Všechna čištění a údržbové operace provádějte po odpojení kompresoru od elektrické sítě.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Zařízení nefunguje	Zkontrolujte připojení k elektrické síti, případně zda je v pořádku pojistka.
Matraci nelze nafouknout	Zkontrolujte zda jsou hadice korektně propojeny a že není v cestě vzduchu žádná překážka

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Produkt má záruku po dobu 2 let, platnou od data zakoupení. Během záruční doby poskytuje prodejce opravu nebo výměnu jakýchkoli vadných součástí zdarma. Veškeré opravy v průběhu záruční doby nemají vliv na délku záruční doby. Za všechny vady, mimo výrobních, zodpovídá koncový uživatel a to i v případě dílů podléhajících opotřebení. Výlohy spojené s opravou nebo výměnou produktu, hradí zákazník. Záruka nebude poskytnuta v případě zjištění neodborné manipulace, úprav zařízení nebo vady způsobené nedbalostí nebo nesprávným užíváním. Záruka zaniká, pokud bylo registrační číslo výrobku odstraněno, poškozeno nebo změněno.