



Uživatelský návod
Excel G-Logic

Informace o prodejci:**Název****společnosti:**

.....

Adresa:

.....

Tel.číslo:

.....

Email:

.....

Webové stránky:

.....

Razítko prodejce:

Obsah

1. Představení	4
2. Popis vozíku	5
3. Technická specifikace Excel G-Logic	6
4. Bezpečnostní pokyny	7
5. Crash test	8
6. Provoz a jízda	9
7. Rozložení a složení	10
8. Sklopný mechanismus a brzdy	11
9. Brzdy pro doprovodnou osobu	12
10. Podnožky	13
11. Použití nášlapky	14
12. Údržba	15
13. Záruka	16
14. Nálepka	18

Představení

Před použitím mechanického vozíku Excel G-Logic si prosím podrobně prostudujte tento návod. Dále souhlasíte s podmínkami používání Excel G-Logic, které jsou uvedené v tomto návodu. Jelikož se produkty Van Os Medical stále zlepšují a vyvíjejí, vyhrazujeme si právo na jakékoliv změny v této uživatelské příručce a to bez upozornění.

Děkujeme vám za důvěru v naše produkty.

Tato uživatelská příručka obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě vašeho mechanického vozíku. Doporučujeme uschovat si tuto uživatelskou příručku, jelikož plní funkci I záručního listu.

Bezpečnostní pokyny v příručce jsou obecné. Je potřeba je dodržovat. Pokud se objevíte v situaci, která není popsána v našich bezpečnostních pokynech a nejste si jisti jak k tomuto problému přistupovat, obraťte se na svého prodejce, který vám poradí.

Váš nový mechanický vozík vyžaduje I pravidelnou údržbu, kterou si můžete provádět sami. Avšak doporučujeme alespoň jednou ročně nechat vozík překontrolovat prodejcem.

Upozornění!

V tomto uživatelském návodu naleznete tipy a rady. Jsou označeny symboly jak vidíte níže.



Tip

Tipy, které jsou v obsaženy v návodu vám pomohou k zlepšit a zjednodušit používání vozíku.




Varování

Varování uvedená v návodu se musí vždy dodržovat. V opačném případě by mohlo dojít k poškození vozíku nebo újmě na zdraví.

Popis vozíku

Váš mechanický vozík je osazen různými komponenty a díly. Než budeme pokračovat dál, je důležité se s jednotlivými částmi seznámit.

1. **Brzdy a madla**
2. **Sklopná opěrka zad**
3. Područky
4. 24" zadní kola (Odnímatelná)
5. Sedadlo
6. Opěrky nohou
7. Brzdy
8. **Nášlapky**
9. **Podnožky**
10. 7" přední kola (castors)

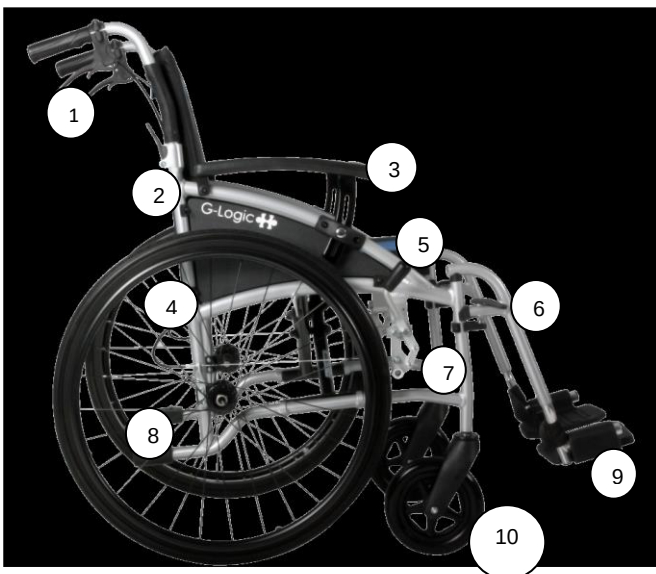

Excel G-Logic je lehký invalidní vozík, který je vybaven brzdami pro doprovodnou osobu. Opěrky rukou jsou výškově nastavitelné pro snadnější sezení u stolu. Podpěrky nohou jsou odnímatelné a dají se odklopit do strany. Kromě toho jsou také podnožky nastavitelné za pomoci imbusového klíče. Zadní kola jsou velmi snadno odnímatelná a zádová opěrka je sklopná pro snazší oblékání a vyslékání oblečení.

Technická specifikace Excel G-Logic

Celková délka	108 cm s podnožkami
Celková šířka	Šířka sedadla + 20 cm
Celková výška	95 cm
Celková váha	11,5 kg
Maximální váha uživatele	Max. 113 kg
Šířka sedadla	40, 45 a 50 cm
Hloubka sedadla	42 cm
Výška sedadla	54 cm
Výška opěrky	42 cm



Bezpečnostní pokyny

Výrobce Van os Medical a Prodejce se zříkají odpovědnosti za zranění nebo škody způsobené na majetku. Aby se tak nestalo, musíte dodržovat následující pokyny.

Bezpečnost

Váš vozík musí projít pravidelnou kontrolou. Pokud najdete jakoukoliv vadu, nebo pokud shledáte, že vozík nefunguje správně, kontaktujte svého prodejce. Je důležité udržovat svůj vozík v dobrém stavu, abyste si vyhlí nebezpečným situacím.

Varování

Abyste předešli poškození vašeho vozíku, musíte si přečíst následující upozornění. Po přečtení varování souhlasíte s předpisy uvedenými v této návodu.

- Když se posadíte na invalidní vozík, vždy zkontrolujte, zda jsou přítomny všechny komponenty a zda nedošlo k poškození. Pokud součásti chybí nebo jsou-li poškozeny, musíte neprodleně kontaktovat svého dodavatele;
- Nepoužívejte invalidní vozík v písku, štěrku, mokřem a kluzkém povrchu nebo povrchu s malou přilnavostí;
- Neopírejte se o madla. To může mít za následek, že se židle nakloní dozadu;
- Nikdy nenastavujte výšku bez pomoci doprovodné osoby;
- Nestůjte na opěrkách nohou, nejsou navrženy tak, aby se na nich mohlo stát, používají se pouze jako opěrky na nohy při sezení.
- Před nasednutím a vysednutím je třeba se ujistit, že vozík stojí na rovném a stabilním povrchu;
- Nejnižší bod stupaček by měl být minimálně 7 cm nad zemí;
- Sepněte brzdy, pokud používáte invalidní vozík ve výtahu, nebo pokud nasedáte a vysedáte;
- Pokud chcete přepravovat mechanická vozík ve vozidle, je dobré jej složit do kufru auto nebo jej převážet v upraveném vozidle se správnými bezpečnostními pásy.
- Maximální váha uživatele byla uvedena na štítku rámu. Nepřekračujte to;
- Invalidní vozík je vhodný pro jednu osobu. Nikdy nepřevážíte druhou osobu na vozíku;
- Náhlá změna směru může způsobit převrácení vozíku;
- Nikdy nejezděte do svahu, který je strmější než 10 stupňů. Zvýšení nebo svah byste měli zvýšit pouze tehdy, když jste s obsluhou;
- Neoprávněné úpravy nebo použití neoficiálních součástí Van Os Medical způsobí ztrátu záruky vozíku a může vést ke zranění uživatele nebo poškození vozíku.

Crash test

Excel G-Logic prošel crash testem a byl schválen pro cestování uvnitř

Pohybujícího se vozidla pokud je k tomu upraveno.

Při používání vozíku v autě se ujistěte, že je vozík řádně upevněn na správných místech.



Customer	VAN OS Medical
Test Item	G-Logic Manual User Propelled Wheelchair
Test	ISO 7176-19:2008 as amended by EN 12183:2014
Millbrook Report No.	17/1000
Millbrook Test No.	S14835

Author:



B. Appleyard
Engineer

Approved:



N. Targett
Manager: Safety Test
Engineering

Date:

26th June 2017

Provoz a jízda

Před použitím Excel G-Logic se ujistěte, že jste si přečetli bezpečnostní předpisy a porozuměli jim. Transportní vozík může používat pouze doprovodná osoba.



EXCEL G-LOGIC | PHOTO 1



EXCEL G-LOGIC | PHOTO 2

Mechanický vozík se 27" zadními koly může obsluhovat člověk sám. Uživatel se může pohánět tím, že tlačí na ruční ráfky připevněné ke straně zadních kol, aby se zpomalil, jednoduše vyvíjí mírný tlak.

Pokud vozík zastavíte, je potřeba zamáčknout brzdy.

Rozložení a složení

Převoz vozíku

Váš Excel G-Logic je navržen pro snadnou přepravu autem. Vozík je skládací, takže celková šířka je snížena na průměrnou šířku 30-35 cm. Kromě toho je váš invalidní vozík vybaven odklápěcími a odnímatelnými opěrkami nohou. Stejně jako stupačky jsou některé další komponenty odnímatelné pro přepravu. Zadní kola lze pomocí systému rychlého uvolnění odpojit.

Složení a rozložení

Pro složení vozíku postupujte následovně:

- Před sklopením invalidního vozíku sejměte opěradlo a sedák;
- Pro úplné sklopení invalidního vozíku musí být opěrky nohou ve správné poloze podle fotografie 4;
- Pro sklopení vozíku musíte stát vedle něj. Podržte a zatáhněte sedadlo, jak je znázorněno na fotografii 5;
- Pro přepravu může být invalidní vozík menší a lehčí. Pro demontáž zadních kol musíte použít systém rychlého odlehčení nápravy podle fotografie 6.



EXCEL G-LOGIC | PHOTO 3



EXCEL G-LOGIC | PHOTO 4



EXCEL G-LOGIC | PHOTO 5



EXCEL G-LOGIC | PHOTO 6

Pro rozložení postupujte opačně.



EXCEL G-LOGIC | PHOTO 7



EXCEL G-LOGIC | PHOTO 8



EXCEL G-LOGIC | PHOTO 9

Sklopný mechanizmus a brzdy

Opěrka zad

Opěradlo G-Logic je připevněno k trubkám spojených s madly. Opěradlo je sklopné. Pro sklopení opěradla postupujte podle následujících kroků;

- Postavte se za invalidní vozík;
- Stiskněte obě černé rukojeti současně na zadní straně vozíku pod madly (viz foto 10);
- Sklopný mechanismus je odemknutý, nyní můžete sklopit zadní část (viz foto 11).



EXCEL G-LOGIC | PHOTO 10

EXCEL G-LOGIC | PHOTO 11

Brzdy

G-Logic je osazen brzdami na kolech a také na madlech. Doporučujeme zabrzdít při nastupování a / nebo sesedání z vozíku, ale také pokud někde jen zastavíte. Pokud chcete zabrzdít, postupujte podle následujících kroků;

Pokud chcete zastavit, zatlačte páku ke kolům a tím zabrzdíte. Před jízdou opět uvolněte brzdy.

Brzdy pro doprovodnou osobu

Rukojeti G-Logic jsou standardně osazeny doprovodnými brzdami (foto 12). Díky tomu může obsluha bezpečně řídit rychlost vozíku a v případě potřeby jednoduše zabrzdit parkovací brzdou.



EXCEL G-LOGIC | **PHOTO 12**

EXCEL G-LOGIC | **PHOTO 13**

Brzdu lze zajistit zatažením za velkou páku a vtlačení malého klipu ukazováčkem. Kola se zamknou na místě a brzda drží, i když pustíte páku. Pro uvolnění brzd znovu stiskněte velkou páku.

Opěrky nohou

Opěrky nohou Excel G-Logic jsou sklopné i odnímatelné. Chcete-li je odstranit, postupujte podle níže uvedených kroků.

- Opěrky vidíte na uvedeny na fotografii 14;
- Vytažením černé páky nahoru (foto 15) můžete vyklopit opěrku na stranu a vyjmout ji;
- Na fotografii 16 vidíte, jak se opěrka odklopila do strany;
- Pro odstranění opěrky jednoduše po dokončení výše uvedených kroků vytáhněte nahoru;
- Při opětovné nasazení opěrky postupujte podle pokynů pro demontáž v opačném pořadí. Správném nasazení opěrky se potvrdí kliknutím.



EXCEL G-LOGIC | PHOTO 14

EXCEL G-LOGIC | PHOTO 15

EXCEL G-LOGIC | PHOTO 16

EXCEL G-LOGIC | PHOTO 17

Je také možné nastavit výšku podnožky, ale je k tomu nutný imbusový klíč (váš imbusový klíč najdete v sadě nástrojů dodávané s vozíkem). Níže naleznete kroky, jak to provést.

Pro snadné seřízení sundejte opěrky nohou, jak je uvedeno výše;

- Uvolněte černý závrtný šroub ve spodní části ramene opěrky;
- Úplně vyjměte šroub;
- Nastavte si podnožku díky předvrtaným otvorům na požadovanou délku;
- Utáhněte zajišťovací šroub.

Stupačka

Excel G-Logic je vybaven dvěma stupačkami (foto 18). Obsluha může pomocí stupačky zvednout přední kolečka (například při zdolávání obrubníku). Chcete-li je použít, zatlačte nohou na stupačku a pomocí nich zvednete přední kola. Nesnažte se zvednout přední kolečka zatlačením na madla, protože by to mohlo poškodit invalidní vozík.

Chcete-li zdolat obrubník, přistupte k němu. Obsluha pak pomocí stupačky zvedne přední kola a spustí přední kola na vyvýšeném obrubníku. Nakonec by měl obsluha tlačít invalidní vozík dopředu a v případě potřeby jej mírně zvednout, aby se zadní kola nadzvedla.

Chcete-li sjet po obrubníku, srovnajte přední kolečka s okrajem obrubníku. Obsluha použije stupačku ke zvednutí předních koleček a nakloní uživatele mírně dozadu. Udržujte kolečka zvednutá a pomalu spustte vozík po chodníku.

EXCEL G-LOGIC | **PHOTO 18**



Údržba

Váš invalidní vozík G-Logic potřebuje pravidelnou údržbu. To je nezbytné pro údržbu pohyblivých součástí. Špatně udržovaný invalidní vozík vám způsobí technické problémy, ztěžuje řízení a nebude se na něj vztahovat záruka. Preventivní údržba je velmi důležitá. Doporučujeme, abyste alespoň jednou ročně zajistili servis u prodejce. Tyto roční kontroly zajistí, že váš invalidní vozík bude fungovat roky.

Před každým použitím vozíku je třeba zkontrolovat brzdy a pneumatiky. Invalidní vozík by měl být skladován v suchém prostředí, mimo přímé sluneční světlo. Invalidní vozík by měl být udržován čistý a bez prachu. Prach leze utřít pomocí prachovky nebo vlhkého hadříku.

Ujistěte se prosím, že pravidelně kontrolujete následující položky, pokud máte nějaké problémy, obraťte se na prodejce, který vám dodal váš invalidní vozík;

- Opotřebení pneumatik;
- ložiska kol;
- kolečka;
- Brzdy;
- Opěrky nohou - zamykací mechanismus;
- Čalounění sedadel;
- Čalounění zad;
- Opěrku roukou;
- Rychloupínací kolík zadního kola;
- Poloviční sklopný zadní mechanismus.

Záruka

Dvouletá omezená záruka

Společnost T&L ručí za mechanické vozíky firmy VanOs madical, v případě vad materiálů a zpracování po dobu dvou let, za předpokladu, že produkty jsou správně smontovány, provozovány a udržovány v souladu s poskytnutým manuálem, který byl předán novému majiteli skútru při jeho zakoupení. Tato záruka se vztahuje pouze k prvotnímu majiteli a nemůže být přenesena na druhého majitele. Tato záruka nabývá platnosti v den uzavření smlouvy a po zaplacení skútru kupujícím. Pokud se v záruční době objeví závada na skútru, majitel je povinen co nejdříve kontaktovat svého prodejce, který buď závadu opraví, nebo dle svého uvážení nahradí vadný díl novým. Na skútru nesmí být provedena žádná oprava, nebo úprava bez výslovného písemného, nebo verbálního souhlasu prodejce. Prodejce nenese odpovědnost za poškození skútru z důvodu nedbalosti, neznalosti, nebo špatným zacházením. Dále prodejce nenese odpovědnost za ztrátu, krádež, nebo poškození skútru druhou osobou. Tato záruka se nevztahuje k pravidelnému servisu, nebo údržbě vztahující se k běžnému opotřebení. Prodejce není zodpovědný za úraz způsobený nesprávným používáním skútru, nebo z důvodu nenahlášení závady na skútru.

Záruka na baterie – na baterie se vztahuje půlroční záruka na kapacitu baterie a dvouletá baterie na obal baterie.

Informace o prodejci – Záruční list

Firma: _____

Popis produktu: _____

Sériové číslo skútru: _____ **Faktura číslo:** _____


Jméno zákazníka a adresa: _____

Město: _____ **PSČ:** _____

Tel.číslo: _____ **Email:** _____

Nálepka

Každý vozík je vybaven speciálním štítkem, kde najdete nejen sériové číslo, ale i další informace o výrobě a skladování vozíku

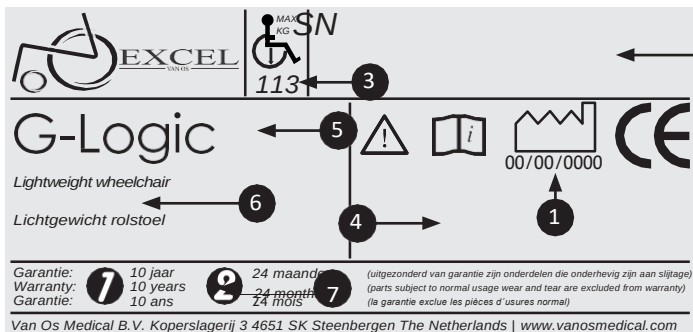

Van Os Medical B.V. Koperslagerij 3 4651 SK Steenberghe The Netherlands | www.vanosmedical.com

1. Datum výroby

2. Sériové číslo

3. Maximální nosnost

4. Model mechanického vozíku

5. Název

6. Popis

7. Záruka



DECLARATION OF CONFORMITY



VAN OS MEDICAL

Declaration of Conformity

Product identification

Product group:	Manual wheelchair
Brand:	Excel
Model:	G-Logic
Number:	VOS.TCF.EC.3373

Manufacturer

Name	Van Os Medical B.V.
Address	Koperslagerij 3 4651 SK Steenberg
Country	The Netherlands

Means of Conformity

The product is in conformity with Directive 93/42/EEC based on the use of a Technical construction file in accordance with Article 9 (Class I products) of the Directive.

Signature of EU Representative

EU Representative:	Wijnand van Os
Function:	Director
Place:	Steenbergen
Date:	01-06-2016



*Van Os Medical B.V.
Koperslagerij 3
4651 SK, Steenberg (NB)
Nederland*

*T: +31 (0) 167 57 30 20
F: +31 (0) 167 57 33 81
E: info@vanosmedical.nl
W: www.vanosmedical.nl*