



Uživatelský manuál

Schodolez pásový skládací 11C s invalidním vozíkem

Příprava schodolezu k použití

Kontrola stavu nabití baterie:

Při zapnutí schodolezu vždy otočte klíčkem ve směru hodinových ručiček. Při vypnutí otočte klíčkem zpět.



Stiskněte tlačítko pro zapnutí a rozsvítí se zelené světlo pokud je v přístroji nabitá baterie.

baterie nabitá:

1 kontrolka -25 % nabití

2 kontrolky = 50 % nabití

3 kontrolky = 75 % nabití


4 kontrolky = 100% nabití



Nabíjení baterie:

Odšroubujte připojovací kabel baterie proti směru hodinových ručiček. Připojte kabel nabíječky a můžete nabíjet akumulátor. Stroj při nabíjení nepracuje. Baterii můžete sundat vysunutím ze schodolezu, samozřejmě platí, že je nutné první odštoubovat připojovací kabel.

Po nabití akumulátoru odpojte nabíječku a připojte zpět připojovací kabel. Pokud jste baterii vysunuli ze schodolezu po dobu nabíjení, tak ji vraťte zpět a přišroubujte připojovací kabel ve směru hodinových ručiček.

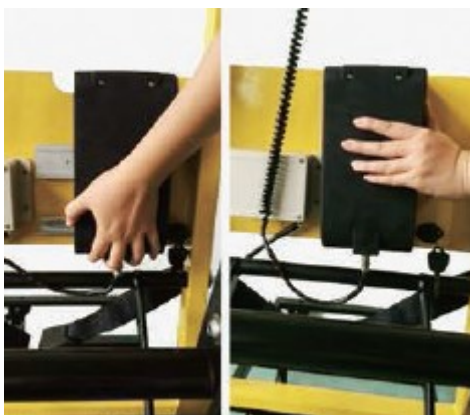

Nasazení mechanického vozíku na schodolez:

Vyjměte elektrický schodolez z místa uložení a odepněte popruh a zároveň držte rukojeť schodolezu ve složeném stavu.

Nastavte si případně šířku nájezdových lišt podle potřeby.




Nastavení rukojeti - příprava k provozu:

Červenou podlouhlou páku posuňte dolů a zvedněte rukojeť nahoru a zajistěte ji požadované v poloze. Nastavte výšku v závislosti na výšce obsluhy. Na výběr jsou dvě výšky.



Nastavení pásů schodolezu:

Zatlačte spodní páku s červenou šipkou dopředu ve směru šipky. Tím se uvolní zajišťovací mechanismus pásů.

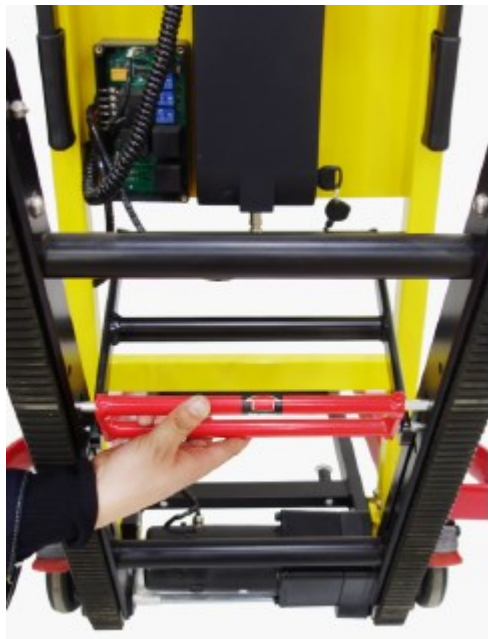

Zatáhněte horní tyč kolejnic dozadu, dokud se nezastaví, pásy zapadnou do druhé aretační polohy.



Nastavení posunu lyžin pro uchycení vozíku:

Povytažením kroužku uvolníte posun a nastavíte ho do šíře, kterou k vozíku potřebujete. Najedzte bezpečně s vozíkem na schodolez, zbrdíte kola vozku.



Brzdění schodolezu:

Stiskněte červenou klapku brzdění pevně nohou, až se brzda zaklapne.



Fixace vozíku ke schodolezu:

Jedním prstem jedné ruky uchopte kroužek, abyste mohli potáhnout směrem ven. Druhou rukou vytáhnete horní část vysunutím ven nebo zatlačte dovnitř, aby se přizpůsobila pro velikosti invalidního vozíku.



Nastavte zámek podle potřeby pro velikosti invalidního vozíku. Zámek se může pohybovat vpravo a vlevo.



Nastavte pojistku tak, aby zachytila k vozíku.



Obsluha schodolezu:

Otočte klíčkem ve směru hodinových ručiček, aby se zapnul schodolez. Na přední straně baterie se rozsvítí červené světlo.



Zapněte ovládací tlačítko přeprutím tlačítka červeného přepínače

- a. | = On
- b. O = Vypnuto

Stisknutím **žlutého** tlačítka schodolez pojede dopředu.



Stisknutím **zeleného** tlačítka pojede schodolez dozadu.

Použití přídavné asistence - Doporučujeme, aby byli přítomni alespoň dva obsluhující schodolez pro přesun osob s hmotností nad 100 kg.



Čištění a údržba:

Vyčistěte schodolez a jeho součásti čistým hadříkem nebo měkkou utěrkou, kartáčem a teplou mýdlovou vodou. Opláchněte jej teplou vodou a vysušte na vzduchu. Nečistěte schodolez prostředky obsahujícími bělidla nebo fenol. Čistěte čističem s tuhými štětinami v případě potřeby lze použít kartáč.

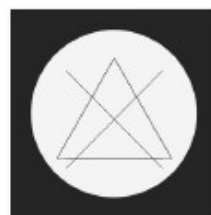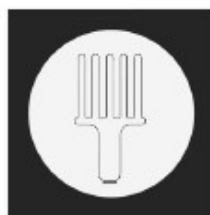

Varování:

Nikdy nenechávejte přepravovanou osobu bez dozoru na pohybuícím se schodolezu a

Vyvarujte se rychlé změny polohy, protože by mohlo dojít ke zranění přepravované osoby. Při nastavování rukojetí podepřete pohyblivý schodolez.

Nesprávná údržba může způsobit zranění. Používejte schodolez pouze pro účely popsané v této příručce.