

# NÁVOD K OBSLUZE



## Hliníkový invalidní vozík se stabilizací zad a hlavy


Kód výrobku: ALH008

### 1. Provedení

Vozík sestává z hliníkového rámu, který je vyztužen dvojitým křížem, a stabilizačního příčnicku u model pro doprovod. Vozík je vybaven opěradlem a sedákem z nylonu a bavlny, který dále změkčuje povlak z prodyšné látky. Vozík je vybaven prodlouženým opěradlem a polštářem pod hlavu, kolečky proti převrácení a bubnovými brzdami pro doprovod. Je také vybaven funkcí nastavení sklonu opěradla v rozsahu 0-90° a nastavitelnými stupačkami. Područky jsou prodloužené a odnímatelné. Zadní 24" nafukovací kola s plastovou obručí, přední 8" plná gumová se zvýšenou odolností proti opotřebení. **Sada obsahuje:** rám vozíku se sedákem, pravou stupačku, levou stupačku, opěrku hlavy, polstrování s polštářem stabilizujícím hlavu, pumpičku, sadu klíčů.

### Součásti vozíku:

- a. madlo
- b. bubnová brzda pro doprovod
- c. sklopné opěradlo
- d. područka
- e. montážní kolečko
- f. bezpečnostní brzda

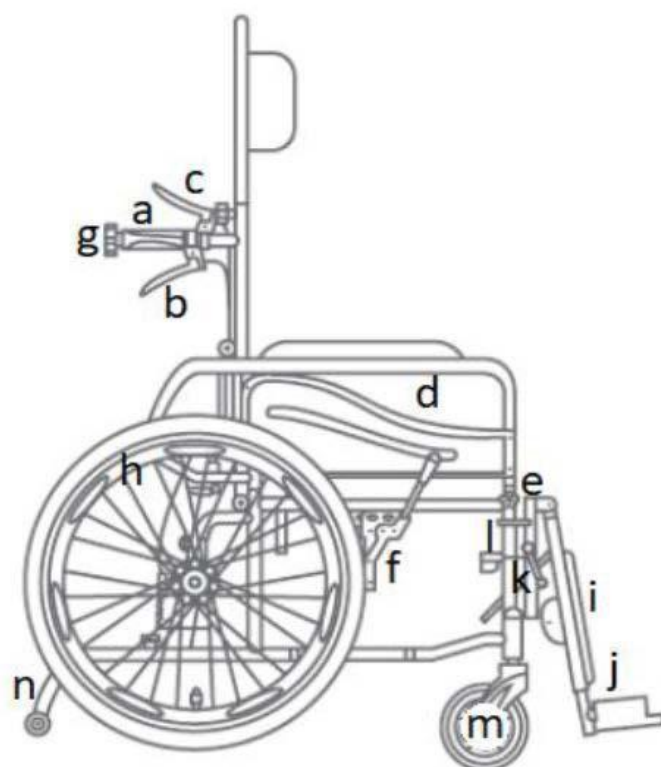

g. šroub stabilizačního příčnicku

h. poháněcí obruč

i. opěrka na lýtko

j. stupačka

k. páka stupačky

l. montážní trn stupačky

m. nastavení těžiště

n. kolečka proti převrácení

## 2. Použití

Hliníkový invalidní vozík je pomůcka pro osoby, které se obtížně pohybují, mají pohybové dysfunkci a omezení. Pohyb vozíku zajišťuje uživatel svými rukama, nebo pomocí doprovodu. Vozík je určen k použití ve vnitřních i venkovních prostorech. Invalidní vozík je určen zejména pro osoby, které mají pohybové potíže způsobené: ochrnutím, mozkovou mrtvicí, poškozením končetin nebo jejich amputací, degenerací nebo deformací končetin, onemocněním srdce a cév, poruchami oběhu, nadváhou nebo chorobně nízkou váhou.

## 3. ROZLOŽENÍ A MONTÁŽ

**Krok 1. Rozložení vozíku** Postavte vozík na podložku. Pomocí madel vzadu na opěradle vozík rozložte. Pak zatlačte na okraje sedáku zepředu a zezadu tak, aby všechny díly vozíku dosedly.

**Krok 2. Montáž stupaček** Namontujte pravou a levou stupačku vpředu na hlavní rám jejich nasazením na dva trny a otočením dovnitř, dokud se nezablokují.

**Krok 3. Nastavení stupaček** Nastavte postupně pravou a levou desku stupačky šroubem na spodní straně přiloženým klíčem. Pak pomocí páky upravte sklon stupačky. Stupačky nastavte tak, aby úhel beder

mezi trupem a stehny dosahoval asi 90° (tím nebude mít uživatel příliš skrčené nohy).

**Krok 4. Nastavení koleček proti převrácení** Zadní kolečka proti převrácení nastavíte tak, že zatáhnete za pojistku, posunete kolečka nahoru, nebo dolů a pak nastavíte požadovanou výšku.

**Krok 5. Montáž hlavové opěrky** Hlavovou opěrku namontujete na opěradlo vozíku pomocí zajišťovacího kolečka a pak k němu na suché zipy připevníte polštář stabilizující hlavu.

**Krok 6. Fixace polstrování** Polstrování připevníte suchými zipy na sedák.

**Krok 7. Montáž stabilizačního příčnicku** Stabilizační příčník namontujte vzadu na opěradlo vozíku pomocí přišroubování k pravému madlu. **Po provedení výše uvedených úkonů je vozík připraven k použití.**

## OPĚTOVNÉ SLOŽENÍ VOZÍKU

- Odklopte stupačky do svislé polohy.
- Sundejte polstrování ze suchých zipů.
- Demontujte hlavovou opěrku a stabilizační příčník.
- Rám vozíku složíte jeho uchopením uprostřed vpředu a vzadu a zatažením za sedák nahoru tak, aby se rám uvolnil se spojovacích prvků.

## FUNKCE BEZPEČNOSTNÍCH BRZD

- Pokud chcete znehybnit kola, posuňte brzdovou páku dopředu, až se úplně zablokuje (zvláště levé a pravé kolo).

## SEŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍCH BRZD

Aby bezpečnostní brzda fungovala správně, musí být správně seřízena a nastavena. Brzda musí být nastavena tak, aby silně blokovala kolo a ovládání páky nevyžadovalo nadměrnou sílu.

- Při přílišném odporu je nutné posunout brzdu mírně vpřed

uvolněním zajišťovacího šroubu na druhé straně brzdy (zevnitř vozíku) a nastavením brzdy v takové poloze, aby chodila lehce a bez odporu.

- Pokud se brzdová zarážka nedotýká celou plochou kola a dostatečně ho neblokuje, postupujte výše popsaným způsobem a posuňte brzdu opačným směrem.

## **FUNKCE POMOCNÝCH BUBNOVÝCH BRZD (PRO DOPROVOD)**

- Pro nouzové brzdění nebo použití parkovací zarážky stlačte brzdovou páku, pro odbrzdění ji uvolněte. Tyto úkony provádějte plynule a s potřebnou silou.

## **FUNKCE NASTAVENÍ OPĚRADLA (PLYNOVÉ)**

Opěradlo lze plynule polohovat pomocí páky vzadu na opěradle nad madly vozíku.

## **FUNKCE DEMONTÁŽE PODRUČEK**

- Pokud chcete demontovat područky, uvolněte (montážní) kolečko vpředu a pak zatáhněte za područku nahoru.
- Pro opětovné namontování nasadte područku do montážních otvorů a pak utáhněte zajišťovací kolečko.

## **FUNKCE NAFUKOVÁNÍ KOL**

Vozík je vybaven 24" nafukovacími zadními koly s průměrem a 8" předními otočnými koly z PU (bezdušové). Vždy systematicky kontrolujte tlak vzduch v obou kolech.

## **FUNKCE NASTAVENÍ PRO OSOBY PO AMPUTACI DOLNÍCH KONČETIN**

**Pozor!** Pro profesionální nastavení se obraťte na prodejce nebo jinou osobu s potřebnými znalostmi a kvalifikací. Vozík nepolohujte sami.

- Těžiště lze nastavovat uvolněním šroubu na pravém a levém předním kole. Pak nastavíte sklon sedáku posunutím osy kola nahoru, nebo dolů, stejně u obou kol.

## **FUNKCE POPRUHŮ PRO UŽIVATELE**

Popruh, který je ve standardní výbavě, slouží k fixaci trupu v případech, kdy uživatel sklouzává z vozíku, nebo se sám neudrží ve správné poloze. Popruh se zapíná na přezku.

#### 4. Technická specifikace

Šířka celkem	67/ 70 cm
Vnitřní šířka	43/ 46 cm
Hloubka celkem	117 cm
Výška sedáku nad podložkou	46 cm (48 cm)
Výška celkem	124 cm (91 cm)
Rozměry sedáku	42/ 45/ 49 x 40 cm
Hmotnost	19,3/ 20,3 cm
Maximální nosnost	100 kg
Rozměry po složení	33 cm
Barva rámu	stříbrná

#### 5. Poznámky a doporučení

**Společnost Timago International Group nenes odpovědnost za nesprávné používání vozíku, nedodržování bezpečnostních zásad a používání, které není v souladu s**

#### 6. Mytí a údržba

Systematicky udržujte součásti vozíku:










- Polstrování a polštář lze mýt hadříkem namočeným do studené nebo teplé vody, který ale nebude mokrá, a bez čisticích prostředků. Odolnější skvrny odstraňte houbou. Při údržbě polstrování dávejte pozor, aby nedošlo k jeho nadměrnému navlhnutí. Sušte mimo dosah zdrojů tepla.
- Plastové díly čistěte vlhkým hadříkem, případně přípravky na čištění umělé hmoty. Dodržujte pokyny výrobce a zásady

bezpečnosti při používání čisticích prostředků.

## 7. Údaje týkající se záruky

Na všechny výrobky, které dodává naše společnost, se vztahuje záruka, jejíž podmínky jsou uvedeny v záručním listě, který jste obdrželi v okamžiku jejich zakoupení. Současně bychom vás rádi upozornili, že při případné reklamaci je nutné předložit doklad o prodeji (fakturu nebo paragon), proto si jej uschovejte.

## 8. Označení

	Referenční číslo		Výrobce
	Číslo šarže		Datum výroby
	Sériové číslo		Zdravotnický prostředek
	Pozor		Seznamte se s návodem
	Výrobce provedl posouzení shody se základními požadavky, které se týkají zdravotnických potřeb.		

Úplná nabídka je dostupná u našich distributorů.

Více informací je na [www.timago.com](http://www.timago.com)

**Děkujeme že jste si vybrali Timago!**



Timago International Group

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Polsko

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



II. vydání, datum aktualizace 29.03.2021