

PONDUS



REHASENSE

*nájezdové rampy
pro invalidní vozíky*

Uživatelský manuál (CZ)



CE

Vážený zákazníku,

Děkujeme za zakoupení našeho výrobku a zároveň Vám chceme poskytnout důležité informace o používání našeho výrobku.

V tomto manuálu najdete veškeré informace týkající se správného a bezpečného používání tohoto zdravotnického prostředku, dále jen „Pondus“.

Před prvním použitím našeho výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento manuál a dodržujte všechna naše doporučení.

Rehasense neustále vyvíjí své výrobky a vyhrazuje si právo měnit specifikace výrobku bez předchozího upozornění.

V případě zájmu a jakýchkoliv dotazů týkajících se našich výrobků kontaktujte naše přidružené zdravotnické obchody nebo přímo společnost Rehasense®. Kontaktní údaje jsou uvedeny na poslední straně manuálu.

2 Pondus Rampy**Použití**

Rampy “Pondus” jsou zdravotnické prostředky pomáhající uživatelům invalidních vozíků. Umožňují uživatelům invalidních vozíků vjíždět na vyšší místa, obrubníky, schody, a také vjíždět a vyjíždět z automobilů. Rampy lze používat v místnostech i venku. Jakékoli použití ramp jiné než pomoc pro invalidní vozíky je zakázáno.

3 Pondus Rampy**Bezpečnostní pravidla**

Před použitím rampy si přečtěte uživatelský manuál. Výrobce nenese odpovědnost za poškození a nehody způsobené nesprávným použitím.

**Maximální pevnost/použití výrobku**

- Používejte pouze rampy v ideálním stavu.
- V případě zjištění jakýchkoli závad okamžitě kontaktujte prodejce.
- Dejte pozor na označení na výrobku.
- Přečtěte si tento uživatelský manuál. Jakákoli poškození výrobku způsobená nesprávným používáním výrobku nebudou výrobcem uznána a nebudou podléhat záručním opravám.
- Nezatěžujte rampy hmotností větší než uvedená na štítku výrobku.
- Dodržujte pokyny týkající se výšky svahů. Nepoužívejte rampy nad doporučenou výškou schodů a nájezdu.
- Používejte rampu pouze k zamýšlenému účelu.
- Neprovádějte žádné konstrukční změny výrobku.
- Při rozkládání a skládání ramp dávejte si pozor, abyste si nepřiskřípli prsty nebo jiné části těla.
- Používejte pouze na stabilním povrchu.



Buďte opatrní, když uvidíte tento symbol. Při skládání a rozkládání ramp může dojít k zachycení prstů nebo jiných částí těla. Dávejte pozor na všechny mezery, vzdálenosti ramp a vyhněte se zbytečnému nastavování.

4 Pondus Rampy

Dodávka

Rampy jsou vyrobeny z hliníku odolného proti korozi. Povrch kolejnic je dodatečně pokrytý protiskluzovým materiálem. Balení ramp obsahuje dvě stejné kolejnice.

Dodávka:

Rampy se dodávají složené v kartonových krabicích. Balení obsahuje:

- 2 rampy
- 1 uživatelský manuál


Zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny prvky zobrazené na obrázku níže. V případě jakýchkoli nesrovnalostí nebo chybějících prvků kontaktujte prodejce.

5 Pondus Rampy

Popis výrobku

Níže uvádíme příklad popisu rampy.


Skládací rampa (1100F2, 1500F2, 2000F2)

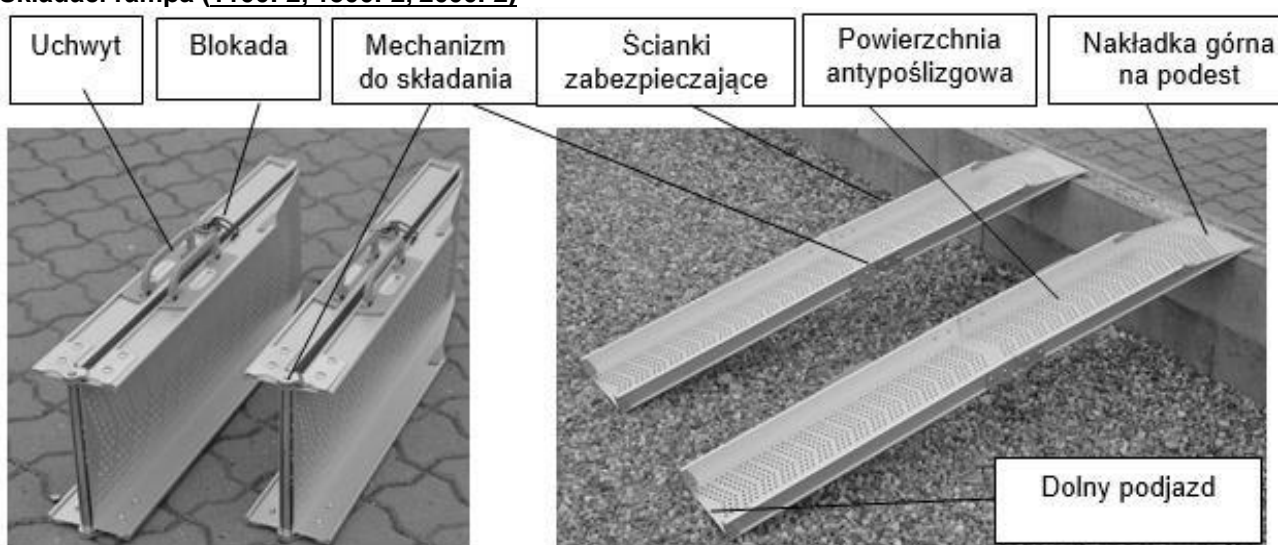

Složená rampa

Rampa připravená k použití


Výsuvná rampa (1200T2, 2000T2, 2000T3, 2900T3)

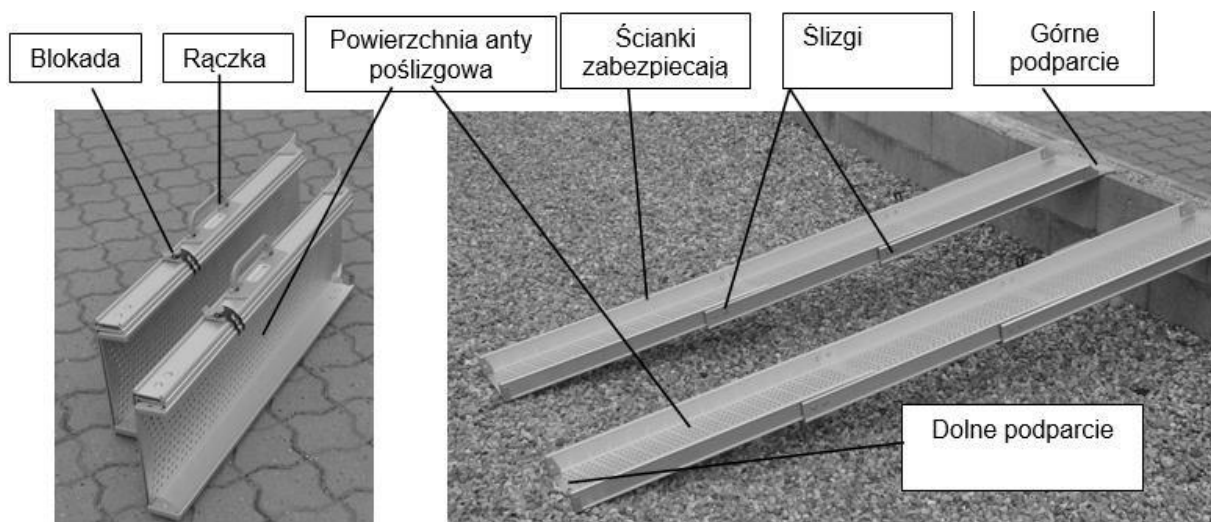

Složená rampa

Rampa připravená k použití

Výsuvná a skládací rampa (2770FT3)

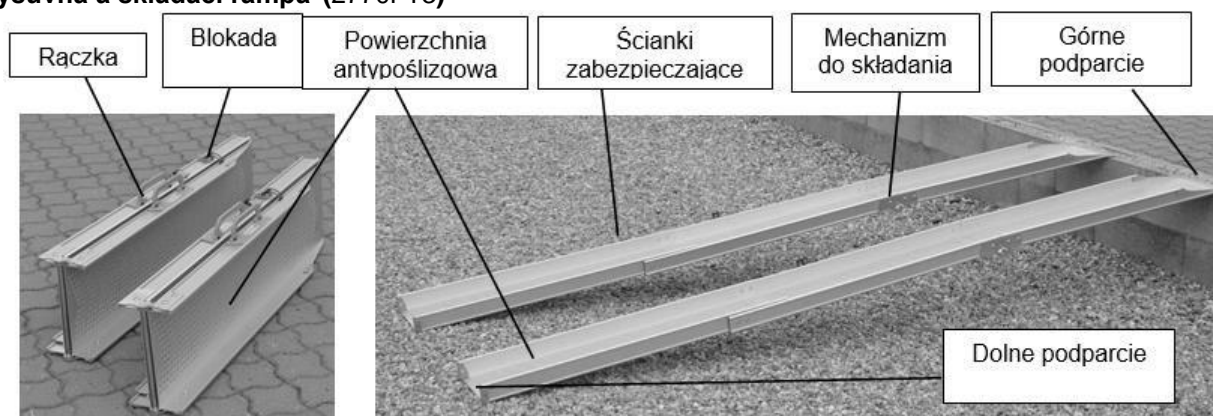

Složená rampa

Rampa připravená k použití

Uchwyt	Držák
Blokada	Blokáda
Mechanizm do składania	Skládací mechanismus
Ścianki zabezpieczające	Ochranné stěny
Powierzchnia antypoślizgowa	Protiskluzový povrch
Nakładka górna na podest	Horní vložka na plošinu
Blokada	Blokáda
Rączka	Držák
Powierzchnia antypoślizgowa	Protiskluzový povrch
Ścianki zabezpieczające	Ochranné stěny
Ślizgi	Kolejnice
Górne podparcie	Horní opěrný bod
Dolne podparcie	Spodní opěrný bod
Rączka	Držák
Blokada	Blokáda
Powierzchnia antypoślizgowa	Protiskluzový povrch
Ścianki zabezpieczające	Ochranné stěny
Mechanizm do składania	Skládací mechanismus
Górne podparcie	Horní opěrný bod
Dolne podparcie	Spodní opěrný bod

Při používání ramp dodržujte doporučení výrobce:

- Pro rozložení rampy uvolněte ochranné blokády umístěné na stranách ramp. Poté rozložte rampu.
- Rampy mají stěny chránící proti posunutí do stran.
- Horní část rampy by měla být při používání vždy nahoře.
- Spodní část rampy by měla být vždy na povrchu.
- Rampy používejte pouze na tvrdém, stabilním povrchu.
- Kolejnice musí být vždy umístěné vzájemně rovnoběžně.
- Před přiblížením k rampě zkontrolujte, zda jsou kolejnice umístěny správně a zda je rampa stabilní.
- Pro složení uvolněte ochrannou blokádu a složte/posuňte – v závislosti na modelu kolejnice – rampu.

Obecné informace, jak používat

- Rampy mají dva boční profily, které chrání proti sklouznutí.
- Rampy mají dva opěrné body:
 - Horní podpěra musí být vždy umístěna na vrcholu překážky, kterou je třeba překonat.
 - Spodní podpěra musí být vždy umístěna v nejnižším místě před překážkou.
- Rampy musí být umístěny na stabilním povrchu.
- Rampy musí být vždy umístěny rovnoběžně.
- Před použitím zkontrolujte, zda jsou rampy stabilní.



6 Pondus Rampy Přeprava

Rampy lze velmi snadno a rychle složit, což uživatelům usnadňuje přepravu. Během přepravy vždy zajistěte a znehybněte rampy, aby nedošlo k jakýmkoli nehodám.

7 Pondus Rampy Technické údaje

<u>Č. zboží</u>	<u>Typ rampy</u>	<u>Max. délka (mm)</u>	<u>Šířka pojezdu (mm)</u>	<u>Max. sklon (podle modelu) (mm)</u>	<u>Max. zatížení obou kolejnic (kg)</u>	<u>Hmotnost obou kolejnic (kg)</u>
PS00550	550S	550	210	110	400	2,9
PS001170	1200S	1170	210	230	400	5,8
PF201100	1100F2	1100	210	220	400	7,1
PF201500	1500F2	1500	210	300	400	9,2
PF202000	2000F2	2000	210	400	300	11,7
PF201190	1200T2	1190	195	240	350	7,3
PT202030	2000T2	2030	195	400	300	11,3
PT301990	2000T3	1990	180	400	300	12
PT302890	2900T3	2890	180	580	250	16,2
PFT32770	2800FT3	2770	195	600	250	16,6

8 Pondus Rampy Štítek

Technický štítek je umístěn na jedné ze stran výrobku. Níže je zobrazen příklad štítku:

Sumer seryjny



Nazwa wyrobu

Data produkcji

Numer wyrobu

Max. waga użytkownika

Max. długość

Max. wysokość

Zapoznaj się z instrukcją obsługi

Wyrób medyczny

Producent

Numer seryjny	Sériové číslo
Wyrób medyczny	Zdravotnický prostředek
Nazwa wyrobu	Název výrobku
Data produkcji	Datum výroby
Numer wyrobu	Číslo výrobku
Max. waga użytkownika	Max. hmotnost uživatele
Max. długość	Max. délka
Max. wysokość	Max. výška
Zapoznaj się z instrukcją obsługi	Přečtěte si uživatelský manuál
Producent	Výrobce

9 Pondus Rampy Čištění

- Udržujte rampy v čistotě a pravidelně je čistěte.

- Lehké nečistoty a prach otřete vlhkým hadříkem.
- Větší nečistoty odstraňte neinvazivními chemickými prostředky, které nezpůsobují korozi.
- Nepoužívejte silné čisticí prostředky nebo bělidla.
- Otřete do sucha měkkým hadříkem.

10 Pondus Rampy

Údržba

Rampy jsou v podstatě bezúdržbové. Vždy před použitím se však doporučuje zkontrolovat, zda povrch kolejnic (pojezd) je čistý. V případě zjištění jakýchkoli nesrovnalostí kontaktujte prodejce. Doporučuje se, aby byl výrobek pravidelně kontrolován odborníky.

- Zkontrolujte všechny ochrany a těsnost ramp.
- Neprodleně vyměňte všechny poškozené, uvolněné díly.

11 Pondus Ramp

Likvidace

Opotřebené rampy předejte k likvidaci. Nevyhazujte rampy s komunálním odpadem.

12 Pondus Rampy

Záruka

Výrobce poskytuje záruku 2 roky na výrobek. Záruka se vztahuje na vady způsobené vinou výrobce. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebenění výrobku nebo na vady vzniklé použitím výrobku jiným způsobem, než je popsáno v manuálu.



REHASENSE

V případě jakýchkoli dotazů nebo pochybností týkajících se výrobku kontaktujte společnost Rehasense nebo distributora.

Distributor:

Výrobce:

Rehasense Sp. z o.o.

Sulejowska 45G

97-300 Piotrków Trybunalski

www.rehasense.com

info@rehasense.com