



REHASENSE

PLAT1000GB

Chodítko vysoké hydraulické zvedací



1. Hlavní informace

Vážený zákazníku,

tato uživatelská příručka obsahuje popis tohoto zdravotnického prostředku a důležité pokyny k zajištění správného a bezpečného používání výrobku. Před použitím je důležité si tento návod pečlivě přečíst. Zvláště důležité je přečíst si bezpečnostní požadavky a dodržovat je. Společnost REHASENSE své výrobky neustále vyvíjí, a proto si vyhrazuje právo na změnu specifikací a funkcí výrobků bez předchozího upozornění.

V případě dotazů se obraťte na svého prodejce nebo přímo na společnost REHASENSE. Kontaktní údaje se nacházejí na poslední straně tohoto návodu.

2. Zamýšlené použití, indikace a kontraindikace

Použití: Chodítka bylo navrženo jako asistenční pomůcka pro chůzi pro osoby, které mají problémy s pohyblivostí spojené se samostatným stáním nebo chůzí. S tímto zařízením mohou tyto osoby snadněji stát a chodit. Hlavním účelem tohoto výrobku je zajištění rovnováhy při chůzi a také částečné odlehčení horních končetin prostřednictvím podpěr předloktí, které lze nastavit dovnitř a ven tak, aby se přizpůsobily trupu uživatele. Podpěry předloktí lze nastavit nahoru a dolů pomocí ovládací páky připojené k plynové vzpěře. Sestavy rukojeti a brzdové páky lze nezávisle na sobě polohovat tak, aby umožňovaly uživateli co nejvhodnější polohu. Takové chodítka nabízí lepší oporu, rovnováhu a stabilitu než běžné kolečkové chodítka. Zařízení lze používat pouze v interiéru. Jakékoli jiné použití je zakázáno.

Indikace: Osoby, které (z důvodu nejrůznějších možných zdravotních problémů) potřebují při chůzi dodatečnou stabilní oporu. Osoby po chirurgickém zákroku na noze, chodidle nebo kyčli, u nichž probíhá fyzická rehabilitační léčba.

Kontraindikace: Chodítka nesmí používat osoby, které mají vážné problémy s rovnováhou těla nebo jejichž svalová síla je příliš nízká na to, aby byly schopny stát a chodit, a to i s dodatečnou podporou chodítka. Potřebu a možnost použití chodítka pacientem by měl vždy posoudit a indikovat lékař nebo fyzioterapeut.

3. Požadavky na bezpečnost

Ujistěte se, že si tuto uživatelskou příručku přečetly všechny osoby, které přístroj používají. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody a/nebo zranění způsobené tím, že uživatelská příručka nebyla dodržena.



Omezení použití


- Zařízení nesmí být zatíženo více než 150 kg.
- Zařízení je určeno k použití pouze v interiéru na rovném povrchu.
- Zařízení NESMÍ být používáno jako stojící pomocná pomůcka.
- Plynová pružina je určena POUZE k podpoře nastavení výšky područek.
- Plynová pružina se nesmí používat jako přídavná síla pro vstávání.

- Zařízení lze používat POUZE tehdy, když jsou opěrné sloupky loketní opěrky zajištěny ve správné poloze pomocí aretačních knoflíků.



Předcházení nehodám

- Zařízení používejte pouze k účelu, ke kterému je určeno.
- Zařízení používejte pouze v dobrém technickém stavu.
- Neprovádějte na zařízení konstrukční změny, pokud k nim nemáte písemný souhlas výrobce.
- Při různých nastaveních, která jsou na zařízení možná, musí uživatel dbát na to, aby nesvíral prsty nebo jiné části těla mezi dvěma pohyblivými prvky zařízení.
- Všechna kola MUSÍ být během používání po celou dobu v kontaktu s podlahou. Tím se zajistí správné vyvážení zařízení a předejde se nehodám.
- Při používání zařízení ve stacionární poloze (stojíte) MUSÍ být ruční brzdy zablokovány.
- Před vstupem nebo opuštěním zařízení bez dozoru MUSÍ být brzdy v uzamčené poloze.

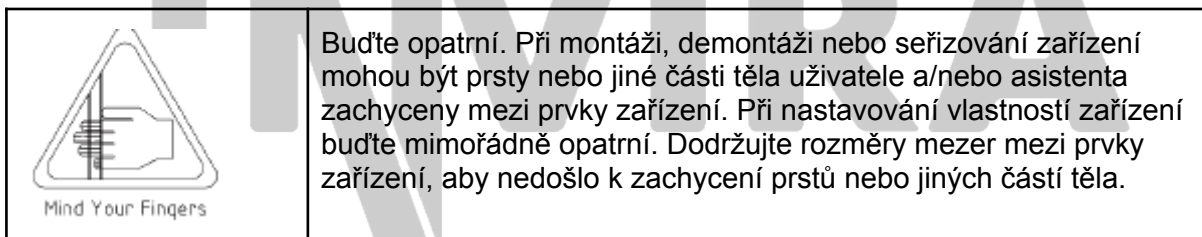

4. Dodávka, montáž a obecný popis výrobku

Popis

Platform je čtyřkolové chodítko s pevným rámem z práškově lakovaného hliníku s opěrkami pro předloktí, které jsou pro bezpečnost a pohodlí uživatele vybaveny rukojeťmi pro tlačení a brzdovými madly. Zařízení nabízí skvělou manévrovatelnost, stabilitu a díky opěrkám předloktí, které lze nastavit ve vertikálním i horizontálním směru... Plošina je vybavena 4 parkovacími brzdami a 2 manévrovacími brzdami aktivovanými ručními pákami.

Dodávka

Chodítka jsou dodávána v kartonech v rozloženém stavu - pro snadnější přepravu. Obsah balení tvoří:

- 1 spodní rám se 4 koly a brzdovými madly
- 1 svislý nosný rám se 2 montážními šrouby utaženými ve spodní části
- 1 sada předloketních opěrek se 2 tlakovými madly
- 1 plynová pružina pro nastavení výšky s uvolňovací pákou

1 sada montážního nářadí (šestihranný rantl 10 mm, šestihranný rantl 6 mm, standardní rantl 13 mm)


1 uživatelská příručka

Počáteční kontrola

Zkontrolujte obsah balíku podle výše uvedeného seznamu. Pokud byste v této fázi zjistili, že některý díl chybí nebo je poškozený, nepokračujte v montáži. Ihned kontaktujte svého dodavatele.

Montáž

Při montáži postupujte podle pokynů uvedených na výkresech této příručky.

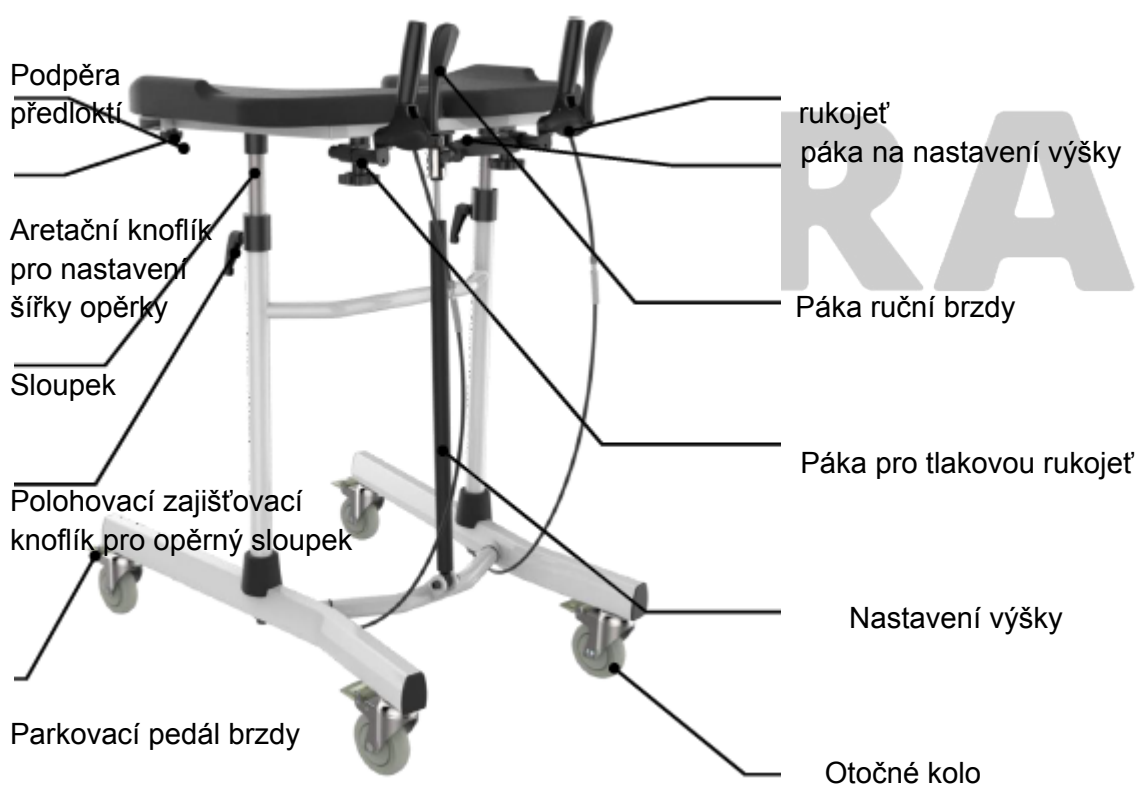

6. Použití



Po montáži nebo seřízení a před použitím se ujistěte, že jsou všechny zajišťovací knoflíky a páčky bezpečně zajištěny, aby bylo zařízení stabilní a pevné. Ujistěte se, že nedochází k nechtěným pohybům. Nedodržení tohoto upozornění může mít za následek zranění osob.

Nastavení výšky opěrek předloktí

- Uvolněte 2 aretační knoflíky umístěné na podpěrných sloupcích;
- Červenou páčku nastavení výšky odjistěte zatažením nahoru,
- Nastavte si požadovanou výšku zatlačením opěrek předloktí dolů nebo je nechte volně pohybovat nahoru.
- Uvolněte červenou páčku nastavení výšky
- Utáhněte 2 zajišťovací knoflíky.

Správně nastavené opěrky předloktí by měly být umístěny ve výšce loktů uživatele, který stojí s pažemi směřujícími dolů.



Přístroj používejte pouze s utaženými 2 zajišťovacími knoflíky.

Nastavení šířky opěrek předloktí

- Uvolněte 2 aretační knoflíky umístěné pod opěrkami předloktí;
- Posunutím podpěr směrem ven nebo dovnitř je upravte na požadovanou šířku;
- Utáhněte 2 zajišťovací knoflíky.

Nastavení délky a úhlu tlačných rukojetí

- Uvolněte 2 aretační páčky umístěné pod ovládacími rukojetmi,
- Nastavte si požadovanou délku a úhel, abyste mohli snadno a pohodlně uchopit rukojeti.
- Utáhněte páky.

Používání ruční brzdy

- K zastavení vozíku WALKER stačí zatáhnout za rukojeti brzdy směrem dozadu k madlům.
- Chcete-li zůstat v klidu, držte brzdové rukojeti v poloze "ZADNÍ".
- K ZAHÁJENÍ POHYBU uvolněte brzdové rukojeti. Ty se automaticky přesunou dopředu a brzdy se uvolní.

Blokování/odblokování ruční brzdy

- Chcete-li brzdy zablokovat, zatlačte brzdové rukojeti dopředu, dokud neuslyšíte zvuk "cvaknutí".
- Pro odblokování brzd zatáhněte za rukojeti brzd směrem dozadu, dokud neucítíte jejich uvolnění.

Blokování/odblokování parkovacích brzdových pedálů

- Chcete-li brzdy zablokovat, sešlápněte brzdový pedál umístěný u kola, dokud se nezablokuje. Tento postup opakujte pro všechna 4 kola.
- Pro odblokování brzd zatáhněte za brzdový pedál zespodu špičkou nohy, dokud se neodblokuje. Postup opakujte pro všechna 4 kola.



- Při používání zařízení ve stacionární poloze MUSÍ být brzdový pedál vždy zablokován.
- Pokud nemáte v úmyslu se zařízením pohybovat, měli byste vždy aktivovat brzdy.
- Nikdy nenechávejte zařízení na svazích bez zapnutých brzd!

7. Popis čištění

Obecné informace:

Přístroj pravidelně čistěte a udržujte jej v čistotě.

Lehčí nečistoty a prach lze odstranit vlhkým hadříkem.


Větší části lze odstranit nekorodujícím jemným mycím prostředkem a teplou vodou.

Nepoužívejte drsné abrazivní prostředky nebo čisticí prostředky na bázi bělidel, které mohou způsobit poškození nebo změnu barvy. Díly osušte měkkým hadříkem.

Kola:

Kola čistěte teplou vodou a jemným čisticím prostředkem. Osušte čistým hadrem. Pro bezproblémový provoz odstraňte veškeré kondenzované nečistoty, které se mohou nahromadit mezi koly a vidlicemi.

8. Popis štítku

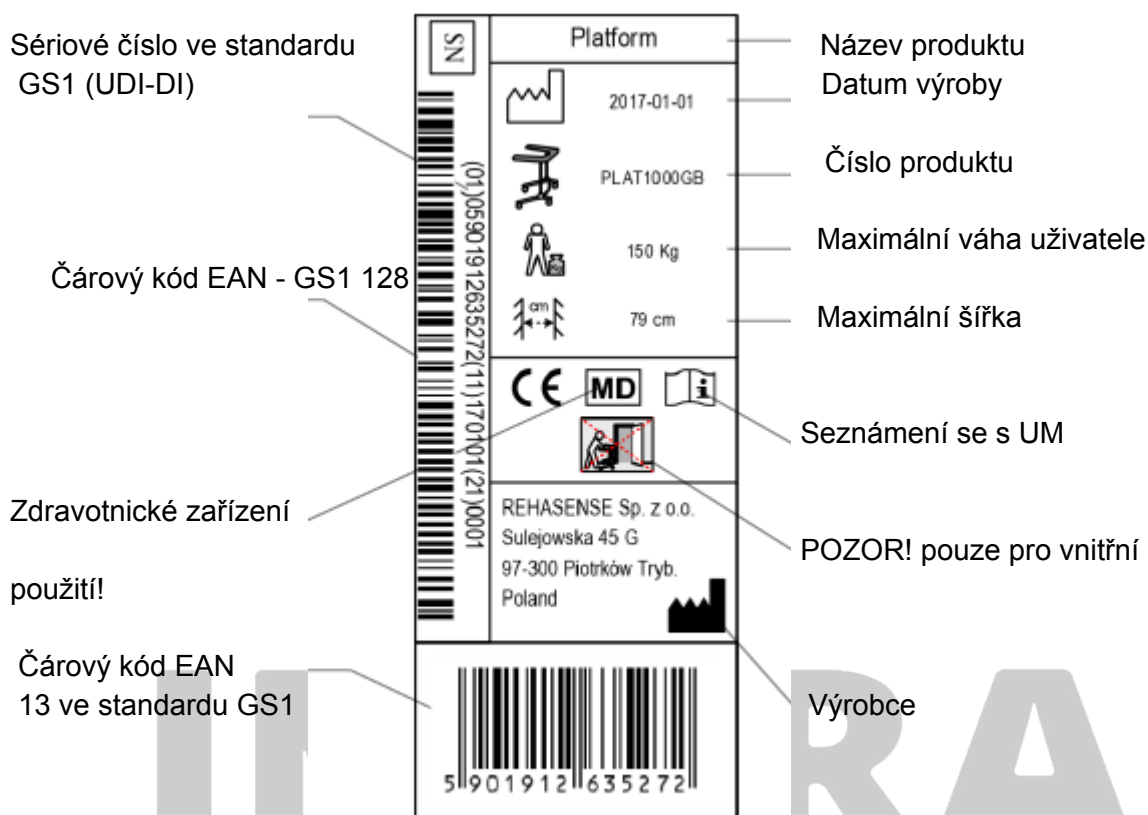

9. Technická data

Maximální nosnost	150 kg
Kolečka	4 x 4 palcová otočná kolečka s parkovacím pedálem a brzdou
Celková hmotnost s krabicí	17,7 kg
Délka	800 mm
Šířka	700 mm
Šířka mezi opěrkami předloktí	370 mm
Výška područek (nastavitelná)	905 - 1310 mm

Celková výška (v horní části rukojetí)	1000 - 1405 mm
Ruční brzdy	2 x nezávislé ruční brzdy pro manévrování

10. Popis přepravy

Zařízení není skládací výrobek vhodný pro přepravu. Pokud je nutné jej přepravovat, doporučujeme použít dostatečně velké vozidlo, aby nebylo nutné zařízení rozebírat. Pokud je nutné zařízení demontovat, postupujte podle návodu k montáži z poslední strany, ale v opačném pořadí. Zařízení by mělo být přepravováno a zajištěno stabilním způsobem a nemělo by hrozit nebezpečí náhlých a nebezpečných pohybů přepravovaného výrobku.

11. Údržba

- Ujistěte se, že je každá část zařízení vždy upevněna a zajištěna.
- Zkontrolujte dotažení všech šroubů. Pokud tomu tak není, v případě potřeby je dotáhněte
- Okamžitě vyměňte všechny rozbité, poškozené nebo opotřebované díly.

12. Opakované použití

Tento zdravotnický prostředek může být znovu použit jiným vlastníkem, pokud jej původní vlastník výrobku již nepotřebuje. Před opětovným použitím musí být přístroj pečlivě zkontrolován autorizovaným technickým personálem.

Je třeba zkontrolovat následující prvky:

- tuhost konstrukce,
- utažení šroubů a matic,
- stav měkkých prvků,
- stav kol a kuličkových ložisek,
- účinnost a stav brzd.

Pokud je některý z výše uvedených prvků roztržený nebo poškozený, měl by být vyměněn za nový. Při změně vlastníka zařízení se zvláště doporučuje instalovat nová kolečka. Všechny ztracené šrouby a matice musí být dotaženy. Výrobek musí být precizně vyčištěn a vydezinfikován.

POZOR! Pokud je hlavní rám ohnutý nebo zlomený, je zakázáno zařízení znovu používat. Každý nový majitel musí obdržet zařízení s příloženým návodem k použití.

13. Jak produkt uložit


Zařízení by nemělo být odkládáno do běžného odpadu. Mělo by být odevzdáno do sběrného dvora k opětovnému použití nebo recyklaci.

14. Záruka

Výrobce poskytuje 2 roky záruky na chyby při výrobě. Záruka neplatí při neúčelovém použití výrobku.

The logo consists of the word 'INVIRA' in a bold, sans-serif font. The letter 'I' is a simple vertical bar. The 'N' is formed by a vertical bar on the left and a diagonal bar on the right that extends downwards. The 'V' is formed by two diagonal bars meeting at a point. The 'I' is a simple vertical bar. The 'R' is formed by a vertical bar on the left and a curved bar on the right. The 'A' is formed by a vertical bar on the left and a triangular shape on the right.

PŘÍLOHA 1: NÁVOD K MONTÁŽI

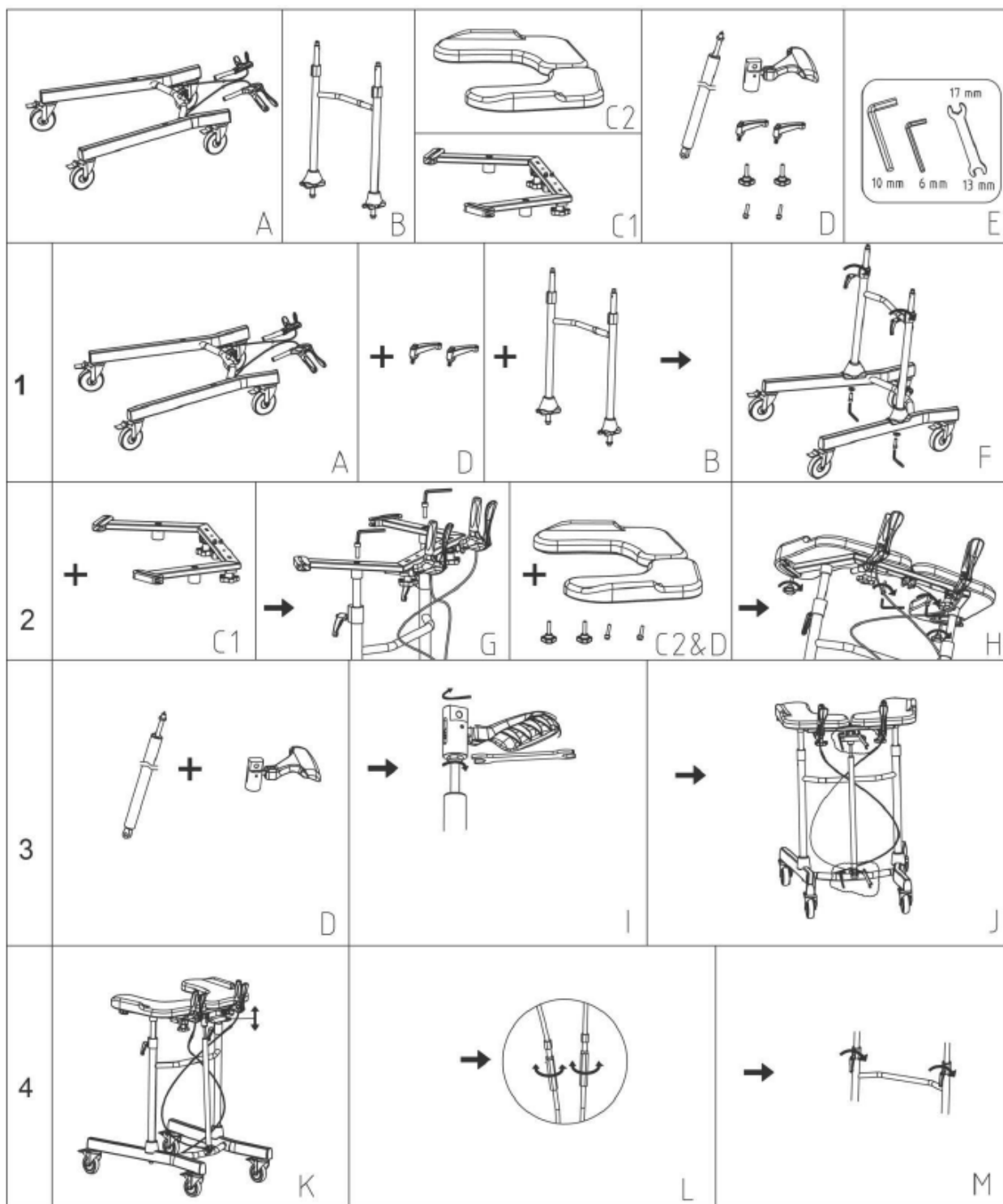



In case of any technical questions contact your local distributor or directly with Rehasense.

Distributor:

Manufacturer

Rehasense® Sp. z o.o.
Sulejowska 45G
97-300 Piotrków Trybunalski
Poland

www.rehasense.com
info@rehasense.com